



**ARKONA**

MUSON – wyrób medyczny w postaci tabletek musujących, do rozpuszczania w wodzie.

### **MECHANIZM DZIAŁANIA**

Płukanie ust roztworem MUSON redukuje ilość drobnoustrojów znajdujących się w jamie ustnej, zapobiegając w ten sposób przed ich przedostawaniem się do organizmu.

Regularne płukanie ust roztworem tabletki MUSON zmniejsza ryzyko przenoszenia drobnoustrojów na osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu. Ma to szczególne znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą kropelkową.

MUSON wspomaga utrzymanie prawidłowej mikroflory jamy ustnej, chroniąc przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych. MUSON jest preparatem bezpiecznym i może być używany według indywidualnych potrzeb. Nie zawiera alkoholu, tym samym może być stosowany wielokrotnie w ciągu doby bez ryzyka wysuszenia śluzówki jamy ustnej.

### **WSKAZANIA DO STOSOWANIA**

- utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej,
- we wspomaganie leczenia stanów zapalnych dziąseł, chorób przyzębia, nawracających aft i pleśniawek,
- we wspomaganie leczenia sezonowych infekcji, a także innych stanach zapalnych zlokalizowanych w obrębie jamy ustnej i gardła.

### **SKŁAD**

dioctan chlorheksydyny, kwas cytrynowy, kwas winowy, wodorowęglan sodu, aromat miętowy

### **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA**

Wyjąć blister z folii ochronnej. Wrzucić 1 tabletkę do 100 ml chłodnej wody (ok. połowa szklanki). Poczekać do całkowitego rozpuszczenia tabletki (30-40 s). Kilukrotnie przepłukać usta przygotowanym roztworem. Nie połykać.

Rozpuszczenie 1 tabletki MUSON w 100 ml wody pozwala uzyskać roztwór chlorheksydyny o stężeniu 0,02% wag. Osad powstający po rozpuszczeniu tabletki jest naturalną cechą wszystkich preparatów musujących. Używać bezpośrednio po sporządzeniu. Roztwór nie nadaje się do dłuższego przechowywania.

## **PRZECIWWSKAZANIA**

Nie stosować wyrobu medycznego MUSON w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

## **DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Działania niepożądane wyrobu medycznego MUSON nie są znane, jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie można wykluczyć wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zaprzestać stosowania wyrobu.

W przypadku ostrych stanów zapalnych błony śluzowej czy otwartych ran jamy ustnej stosowanie roztworu tabletki MUSON może wywoływać reakcje bólowe.

## **INFORMACJE DODATKOWE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Tabletki MUSON są silnie higroskopijne. Otwierać blister ostrożnie, unikając odsłonięcia drugiej tabletki. W przypadku rozszczelnienia blistra zużyć odsłonięte tabletki w możliwie krótkim czasie.

W trakcie dłuższego przechowywania tabletki mogą ulegać naturalnemu ciemnieniu. Nie ma to wpływu na efektywność działania preparatu.

Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy oraz u kobiet w ciąży.

Preparat nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu, przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

## **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

## **GWARANCJA**

Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystąpienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.03.2020 r.