

SILOFF jest przeznaczony tylko do zastosowań zewnątrzustnych. SILOFF może być stosowany na silikony addycyjne i kondensacyjne.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

1. Oczyszczyć i osuszyć przeznaczoną do zaizolowania powierzchnię.
2. Delikatnie wstrząsnąć produktem przed użyciem.
3. Spryskać przeznaczoną do zaizolowania powierzchnię z odległości ok. 15 cm.
4. Pozostawić na około 20 sekund aż do wyschnięcia powierzchni. W celu przyspieszenia wysychania można użyć nawiewu.

Wyschnięty SILOFF tworzy na zaizolowanej powierzchni warstwę, która pozwala na bezpieczny kontakt z innymi materiałami. Produkt zmywa się przy pomocy wody.

INFORMACJE DODATKOWE I ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI: Nie wdychać. Niewłaściwie użyty produkt może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Nie rozpylać w pobliżu oczu. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą i dobrze spłukać.



ARKONA
Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasurów 99C, 21-025 Niemce, Polska, EU



ARKONA

SILOFF

SPRAY ANTYADHEZYJNY
ZAPEWNIĄCY DOBRĄ SEPARACJĘ
SILIKONÓW PO ZWIĄZANIU

85 ml

OSTRZEŻENIA: Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych. Chronić przed przegrzaniem. Nie zamrażać. Używać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać po upływie terminu ważności. Produkt niebezpieczny dla środowiska.

UWAGA! Pojemnik pod ciśnieniem.

Produkt łatwopalny.

Trzymać z dala

od źródeł zapłonu.



PRZECHOWYWANIE: Chronić przed światłem słonecznym oraz temperaturą powyżej 50°C. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. **GWARANCJA:** Firma ARKONA wymienia produkty, lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystąpienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.09.2021 r.