



ARKONA


Od Stomatologa dla Stomatologów

LAKOWANIE ZĘBA 17
LAKIEM SZCZELINOWYM
i WYTRAWIACZEM STOMATOLOGICZNYM
pacjentka 18 lat

 SZYBKIE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA POWAŻNYCH PROBLEMÓW



www.arkonadent.com

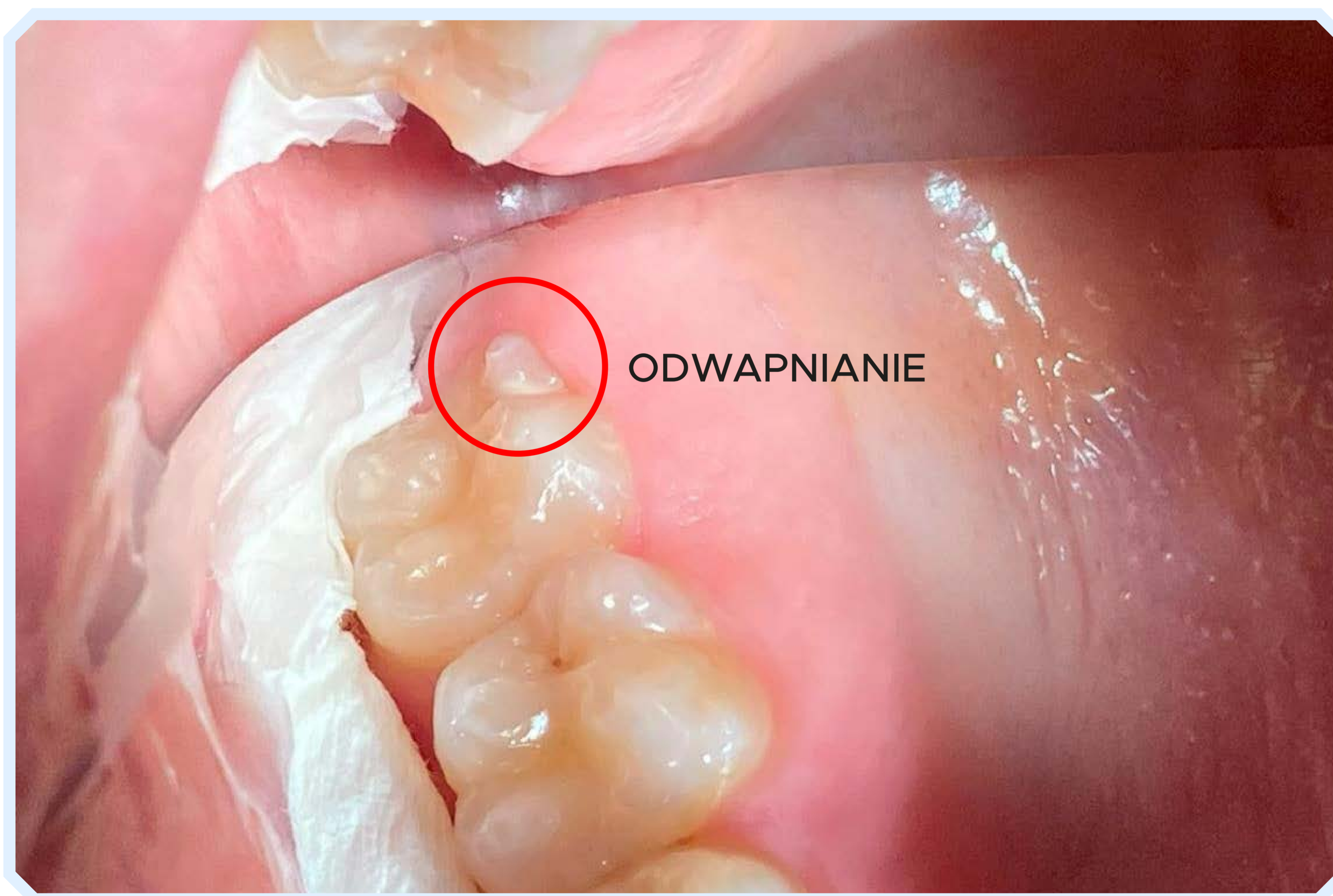

- Często obserwowanym zjawiskiem, zwłaszcza u naszych młodszych pacjentów, są pojawiające się odwapnienia, świadczące o początkowym stadium choroby próchnicowej.
- Zauważamy je zazwyczaj w trudno dostępnych miejscach jamy ustnej, czyli bruzdach i dołkach zębów bocznych. Taką sytuację widzimy u naszej 18-letniej pacjentki.



- Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię dołków i bruzd aplikujemy **WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY**, który przygotowuje powierzchnię szkliwa do nałożenia **LAKU SZCZELINOWEGO**.
- Dzięki żelowej konsystencji materiału jesteśmy w stanie precyzyjnie rozprowadzić produkt, nie doprowadzając do niekontrolowanej demineralizacji nieporządkanych przez nas obszarów szkliwa.
- Wytrawiona powierzchnia szkliwa ma kolor kredowobiały, co ułatwia nam dokładną aplikację laku na powierzchni zęba. Jego płynna konsystencja zapewnia nam wygodną pracę, a jednorazowy aplikator zapewnia bezpieczeństwo naszych pacjentów i podwyższa standard świadczonych usług.



- Po spolimeryzowaniu materiału mamy ząb zabezpieczony przed próchnicą. Cały proces zajmuje zaledwie 15 minut! Lakowanie oszczędza nasz czas i ułatwia pracę. Zaoszczędzamy pacjentom stresu i bólu, dzięki czemu zyskujemy ich zaufanie i wdzięczność rodziców za ochronę zębów ich pociech.



DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ LAKOWANIE?



ARKONA



- Łatwo i szybko wykonasz zabieg
- Bezinwazyjny, niskokosztowy zabieg
- Mniej twojego stresu związanego z „cierpieniem” twojego pacjenta
- Zadowolony, powracający klient to twój zysk!





ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów



www.arkonadent.com