



ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów

Wykonanie mostu na bazie WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO** na zębach 13-22

 SZYBKIE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA POWAŻNYCH PROBLEMÓW

Podczas zabiegu użyto:

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY • MASTERBOND • BOSTON GLAZURA • BOSTON



www.arkonadent.com



- Na zdjęciu widoczny stan początkowy.

- Braki zębowe w estetycznym odcinku szczęki stanowią istotny problem wśród pacjentów stomatologicznych. Zaniedbania higieniczne oraz urazy powodują utratę zębów, czego skutkiem są poważne kompleksy i brak chęci uśmiechania się przez osoby dotknięte tym problemem.
- Przeszkodami w odzyskaniu dawnego uśmiechu często są lęki, finanse oraz czas. W takich sytuacjach warto znaleźć rozwiązanie, które będzie dostosowane pod możliwości i potrzeby Pacjenta.
- W przypadku tego Pacjenta zaproponowano wykorzystanie WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO** do utworzenia kombinowanej odbudowy adhezyjnej.
- Pacjent będzie mógł cieszyć się olśniewającym uśmiechem po zaledwie jednej wizycie!





ARKONA

➔ ETAP 1 - PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU



- Przed przystąpieniem do pracy należy opracować tkanki próchnicowe, a następnie te powierzchnie dokładnie wytrawić. **WYTRAWIACZEM STOMATOLOGICZNYM** trawimy szkliwo przez 30 sekund a zębinę jedynie 10 sekund. Dokładnie płuczemy, suszymy i pokrywamy systemem wiążącym **MASTERBOND** w celu utworzenia adhezji **WŁÓKNA KOMPOZYTOWEGO** z tkankami zęba. Takie przygotowanie pola pracy zapewni nam komfort pracy i znacznie przedłuży trwałość odbudowy adhezyjnej.



ETAP 2 - BUDOWA ŁUKU ADHEZYJNEGO I ODBUDOWA BRAKUJĄCYCH ZĘBÓW



ARKONA



- Po odpowiednim przygotowaniu miejsc wypreparowanych w łuku przy użyciu WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO** wykonujemy podbudowę zębów przednich o kształcie pierścienia.
- Po jego polimeryzacji odbudowujemy brakujące części zębów wykorzystując kompozyt **BOSTON**.
- Tak wzmocnione zęby są odporne na siły znacznie mocniejsze niż siły żucia.



- Po wykalkowaniu i dopasowaniu zębów w zgryzie jest czas na nadanie pracy połysku. Ten krok wykonujemy za pomocą **BOSTON GLAZURY**. Jej użycie oszczędza wiele czasu na mechanicznym polerowaniu pracy oraz dzięki połyskowi odmładza wizualnie uśmiech.
- Efekt końcowy pracy wzmocnionej **WŁÓKNEM KOMPOZYTOWYM**.



KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO**



ARKONA



- **Jednowizytowe uzupełnienie braku zęba**
- **Zaspokojenie potrzeb pacjenta** - wdzięczność i satysfakcja
- **Łatwe wprowadzanie korekt** - dobra estetyka i funkcjonalność zęba na długie lata
- **Oszczędność czasu procedury** - Twój zysk
- **Nieinwazyjna możliwość uzupełnienia braku zębowego.**
- **Możliwość wyleczenia pacjentów**, których do tej pory z różnych powodów traciliśmy



ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów



www.arkonadent.com