



ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów

LAKOWANIE ZĘBA 36

FLOW-COLOR i WYTRAWIACZEM STOMATOLOGICZNYM

pacjent 11 lat

 SZYBKIE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA POWAŻNYCH PROBLEMÓW

Podczas zabiegu użyto:

MASTERBOND



www.arkonadent.com



- U młodych pacjentów często zauważmy, że poziom oczyszczania zębów nie jest tak dokładny, jakbyśmy tego oczekiwali. W trudno dostępnych miejscach typu bruzdy i dołki zębów bocznych obserwujemy początkowe stadia próchnicy- odwapnienia. W celu zapobiegania progresji próchnicy możemy przeprowadzić procedurę lakowania. Przy użyciu laku kolorowego FLOW-COLOR możemy skutecznie zabezpieczyć zęby pacjenta, dodatkowo dając „małemu” pacjentowi frajdę zabawy kolorami. Zadowolony pacjent i jego rodzice to pacjent powracający i polecający swojego lekarza dentystę.



- Do aplikacji wytrawiacza zęb powinien być oczyszczony i osuszony. Żelowa konsystencja **WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO** i precyzyjna końcówka zapewniają nam aplikację produktu jedynie w miejscach, na których nam zależy. Chroni to zęb pacjenta przed niepotrzebną demineralizacją zbyt dużej powierzchni szkliwa zębów oraz jego tkanki miękkie jamy ustnej. Dzięki tym cechom materiału czas wykonania procedury się skraca, a komfort naszej pracy jest większy.



- Żel pozostawiamy na zębie około 30 sekund, a następnie spłukujemy obfitym strumieniem wody, aby w jamie ustnej pacjenta nie pozostały resztki materiału. Dzięki temu krótkiemu zabiegowi wytrawiona powierzchnia zęba zyskuje lepszą zwilżalność przez system wiążący, który umożliwi nam lepsze wiązanie do laku FLOW-COLOR.




- Wytrawiona powierzchnia szkliva ma bielszy odcień niż naturalny kolor zęba, co nakreśla nam właściwy obszar do aplikacji MASTERBONDU, a następnie FLOW-COLOR.



- Przed nałożeniem systemu wiążącego zęb dokładnie osuszamy.



- MASTERBOND starannie wcieramy przez kilka sekund tak, aby cała wytrawiona powierzchnia była pokryta systemem wiążącym. Zapewni to odpowiednią adhezję FLOW-COLOR do zęba, dzięki czemu połączenie substancji będzie trwałe.

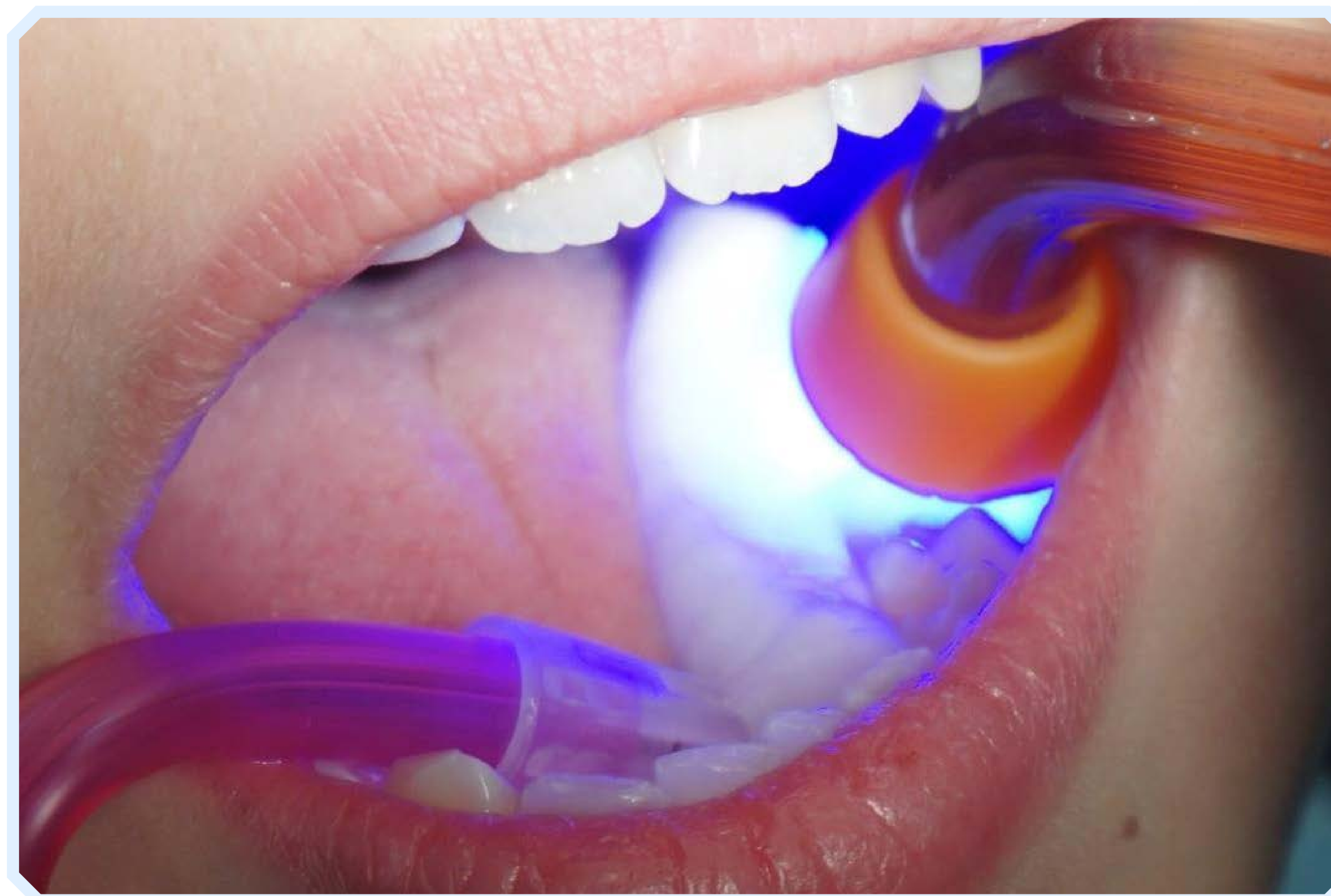

- Przed polimeryzacją delikatnie rozdmuchujemy nałożony wcześniej MASTERBOND, żeby alkohol mógł odparować.
- Następnie polimeryzujemy ząb przez 10-15 sekund, w zależności od parametrów naszej lampy.



- Gdy ząb jest odpowiednio przygotowany możemy przejść do aplikacji FLOW-COLOR. Nakładamy cienką warstwę materiału szybko i precyzyjnie, co umożliwia nam cienka końcówka dostosowana do pracy w zębach bocznych. Dzięki kolorowej pigmentacji laku nasi „mali” pacjenci wraz z rodzicami mogą kontrolować proces ścierania laku, który wskazuje, kiedy powinni do Was wrócić, aby powtórzyć zabieg.



- Systematycznie powtarzając zabieg zalakowane zęby będą stale zabezpieczone. Procedura lakowania jest szybka i skuteczna. Profilaktyka próchnicy odsuwa w czasie bardziej inwazyjne leczenie zębów u Twojego pacjenta. Na lakowanie poświęćcie mało czasu lub delegujecie pracę higienistce, a macie w portfolio nowy zabieg i powracających zadowolonych pacjentów.



DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ LAKOWANIE KOLOREM?



ARKONA



- Łatwo i szybko wykonasz zabieg
- Bezinwazyjny, niskokosztowy zabieg
- Zabawa kolorem, radość i lojalność „małych” pacjentów!
- Zadowolony, powracający klient to twój zysk!



ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów



www.arkonadent.com