



ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów

Wykonanie szyny stabilizującej zęby dolnego łuku na bazie WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO** na zębach 33-43

 SZYBKIE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA POWAŻNYCH PROBLEMÓW

Podczas zabiegu użyto:

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY



www.arkonadent.com



- Problemami, z którymi zmagają się pacjenci z parodontozą są zanik kości wyrostka zębodołowego, przez który obniża się brzeg dziąsła, a zęby stają się rozchwiane i niestabilne. Taka sytuacja wymaga pilnej interwencji specjalisty, aby unieruchomić i zabezpieczyć zęby.
- Sprawdzonym sposobem w tego typu przypadkach jest użycie WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO** do zszynowania ruchomych zębów.
- Problem zostaje wówczas rozwiązany w bardzo estetyczny sposób, co zapewni Pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.



ARKONA

➔ ETAP 1 – PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU



- Przed przystąpieniem do zabiegu odmierzamy fragment WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO**, nieco dłuższy niż odcinek w łuku. Zęby, które zostaną połączone szyną kompozytową wytrawiamy z wykorzystaniem **WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO**. Następnie dokładnie osuszamy.



- Przed aplikacją systemu łączącego zęby należy ustabilizować przy użyciu klinów. Umożliwi to dokładną i wygodną aplikację WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO** oraz zapobiegnie dostaniu się materiału kompozytowego w trudno dostępne do oczyszczania miejsca.



ARKONA

➔ ETAP 3 - APLIKACJA WŁÓKNA KOMPOZYTOWEGO



- Po odpowiednim przygotowaniu zębów należy etapowo umieszczać odmierzony fragment WŁÓKNA KOMPOZYTOWE na zębach łuku dolnego. Fragment wprowadzamy również w przestrzeń międzyzębowe, a każdy ząb powinien być z trzech stron zabezpieczony WŁÓKNEM KOMPOZYTOWYM. Następnie przechodzimy do modelowania, aby WŁÓKNO KOMPOZYTOWE dokładnie przylegało do zęba zapewniając gładką powierzchnię.



ETAP 4 - DOPASOWANIE W OKLUZJI



ARKONA



- Aby szyna prawidłowo spełniała swoją funkcję zęby należy dopasować zgryzowo za pomocą kalki dbając o równomierne kontakty. Przy prawidłowej higienie proces rozchwiania nie będzie postępował, a zęby będą stabilne i zabezpieczone przez wiele lat!





KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA WŁÓKNA **KOMPOZYTOWEGO**



ARKONA



- **Jednowizytowe i nieinwazyjne ustabilizowanie zębów w łuku**
- **Zaspokojenie potrzeb pacjenta** - wdzięczność i satysfakcja
- **Łatwe wprowadzanie korekt** - dobra estetyka i funkcjonalność zęba na długie lata.
- **Oszczędność czasu procedury** - Twój zysk
- **Możliwość wyleczenia pacjentów**, których do tej pory z różnych powodów traciliśmy





ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów



www.arkonadent.com