



ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów

Wykonanie wypełnienia kompozytowego w zębie 36


 SZYBKIE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA POWAŻNYCH PROBLEMÓW

Podczas zabiegu użyto:


WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY • MASTERBOND • PODBARWIACZ • FLOW-ART • BOSTON • BOSTON GLAZURA



www.arkonadent.com

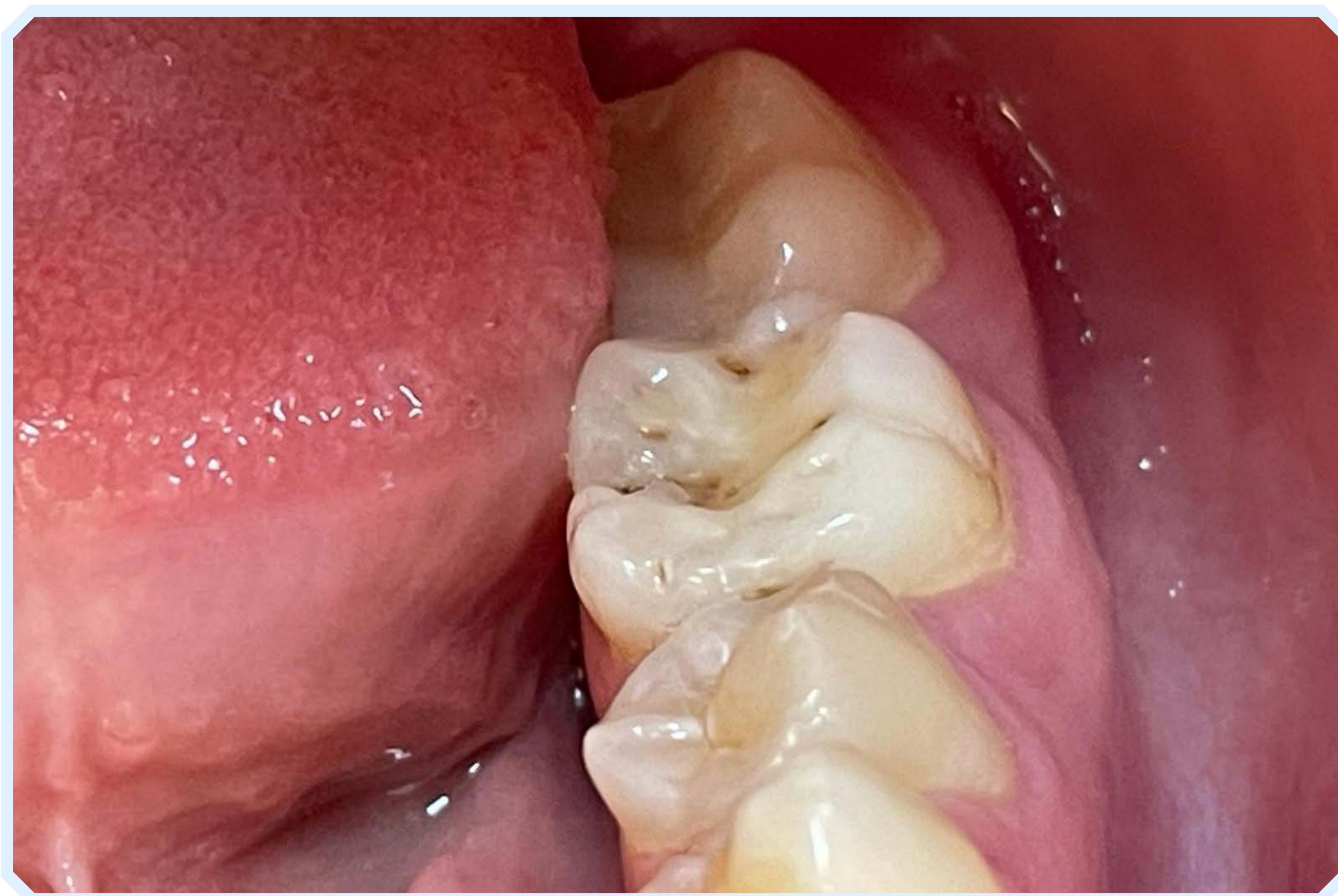


- Celem wizyty pacjenta było leczenie ubytku próchnicowego i odbudowa zęba 36. Zależało mu na uzyskaniu efektu naturalnego zęba. W tym celu wykorzystano produkty takie jak: WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY, MASTERBOND, FLOW-ART, BOSTON, PODBARWIACZ, BOSTON GLAZURA.

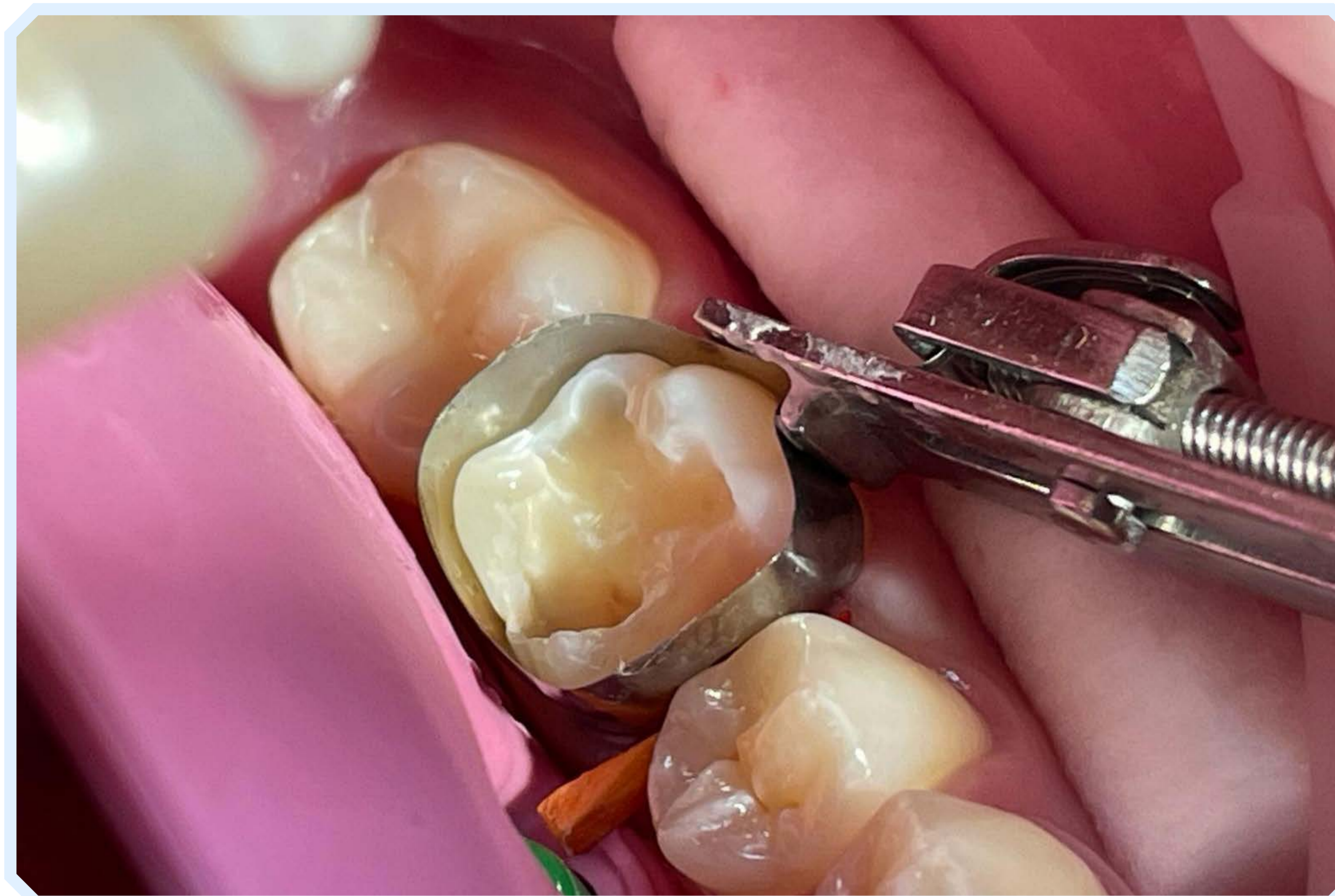


- Tkanki zmienione próchnicowo usuwamy, a na ząb nakładamy formówkę w celu zabezpieczenia i dokładnej odbudowy ścian stycznych. Staranne przygotowanie pola pracy skraca późniejsze etapy pracy oraz ułatwia wykonanie anatomicznej odbudowy. Krótszy czas spędzony przez Pacjenta na fotelu zaowocuje jego zadowoleniem i budowaniem zaufania do swojego Dentysty.




- Po założeniu formówki i zabezpieczeniu klinem, ząb wytrawiamy **WYTRAWIACZEM STOMATOLOGICZNYM** przez 10 sekund zębinię i 30 sekund szkliwo, a następnie dokładnie spłukujemy ubytek wodą i osuszamy. Etap usunięcia warstwy mazistej dzięki wytrawieniu warunkuje dobrą penetrację bondu i adhezję całego wypełnienia do tkanek zęba. Jest to gwarancja wieloletniej trwałości pracy.

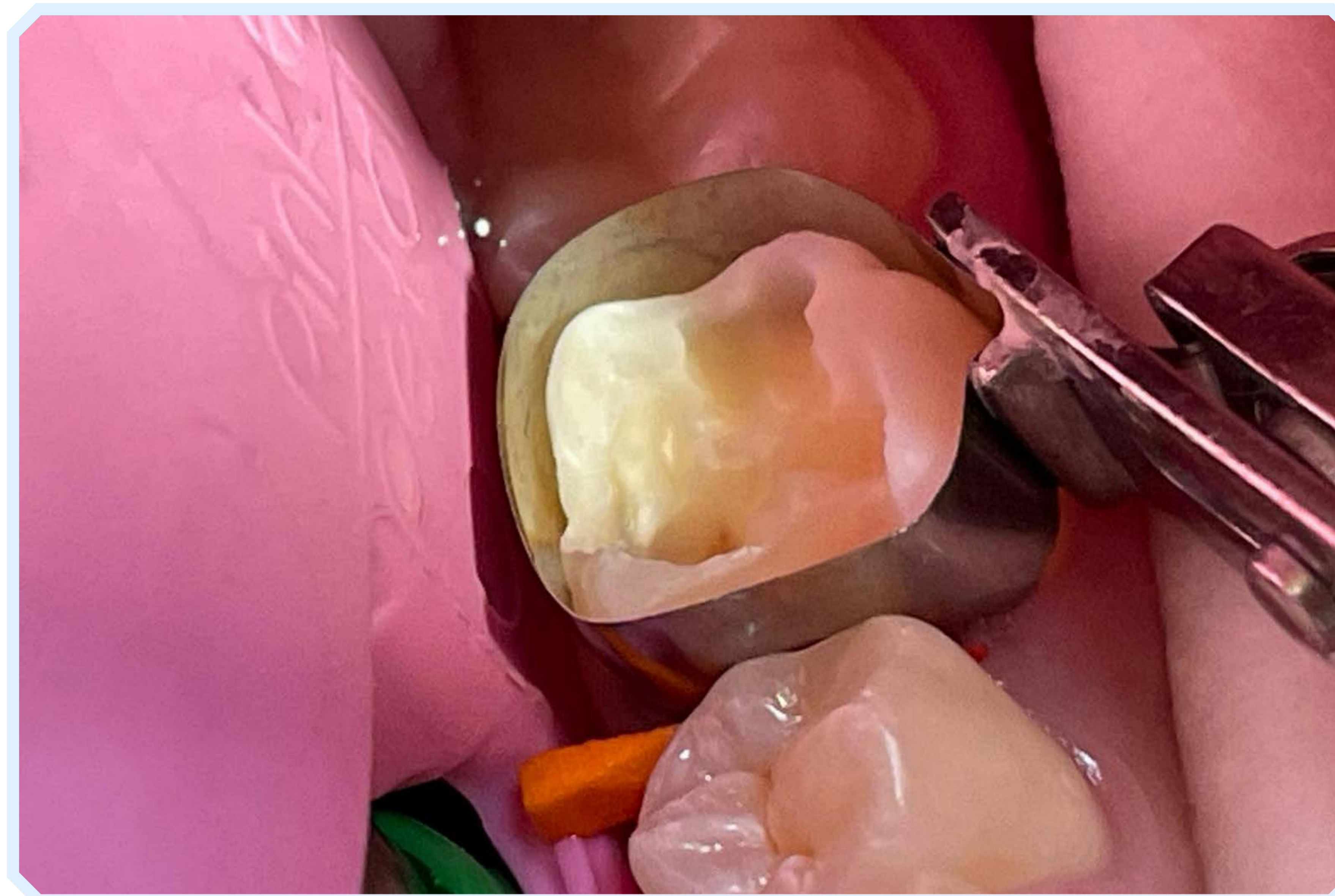

- Oczyszczony, wytrawiony i osuszony ząb jest gotowy do nałożenia systemu wiążącego. Dzięki takiemu przygotowaniu materiały przez nas nakładane będą z łatwością rozprowadzać się po zębie, a praca dzięki temu będzie wygodna i bezproblemowa.

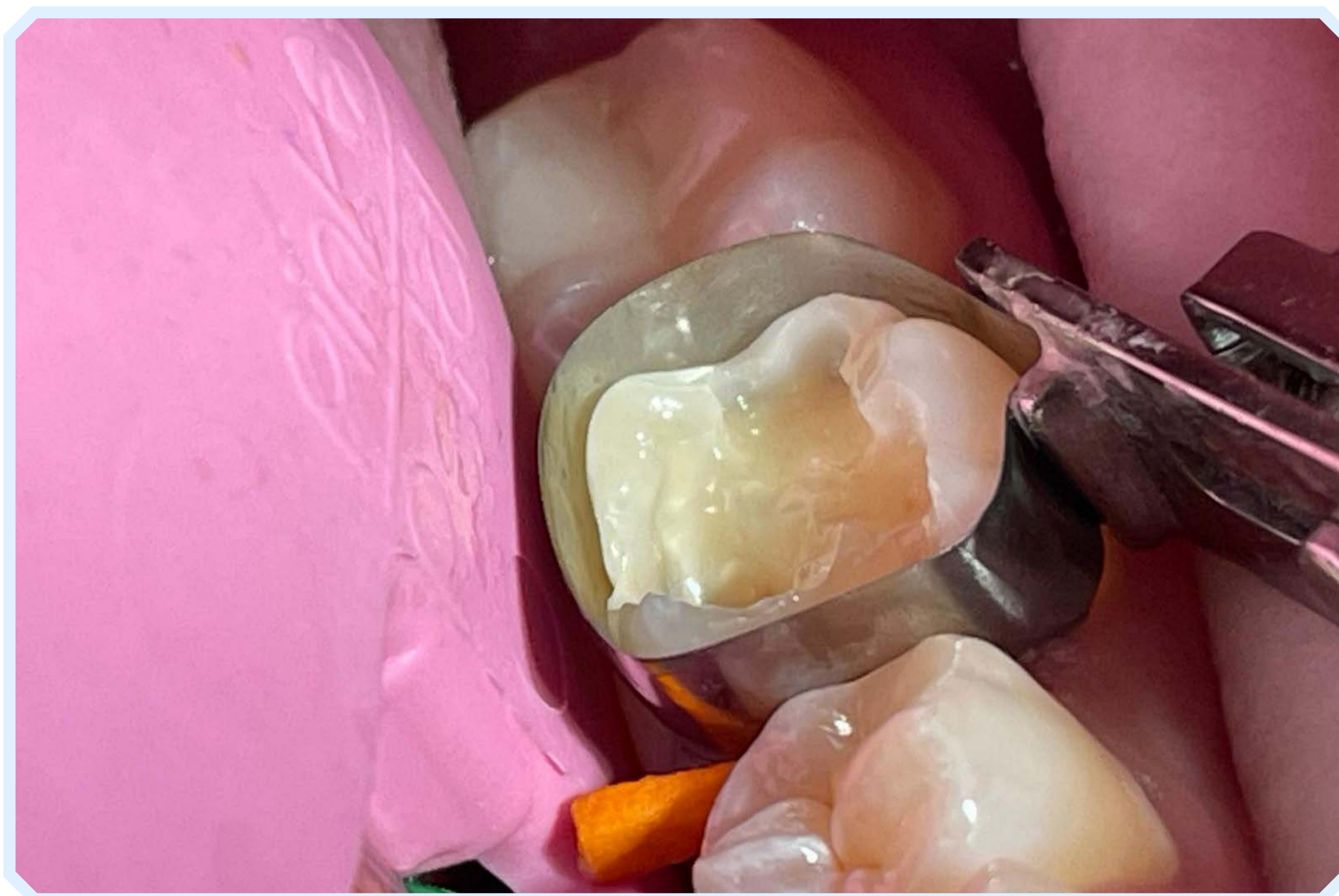

- Dokładnie wcieramy system wiążący MASTERBOND. Następnie osuszamy delikatnie, aby rozpuszczalnik odparował i naświetlamy ząb 15 sekund. Etap ten jest niezmiernie istotny w całym procesie odbudowy, ponieważ łączy trwale materiał kompozytowy z tkankami zęba bez konieczności nadmiernie inwazyjnego opracowania tkanek pacjenta.

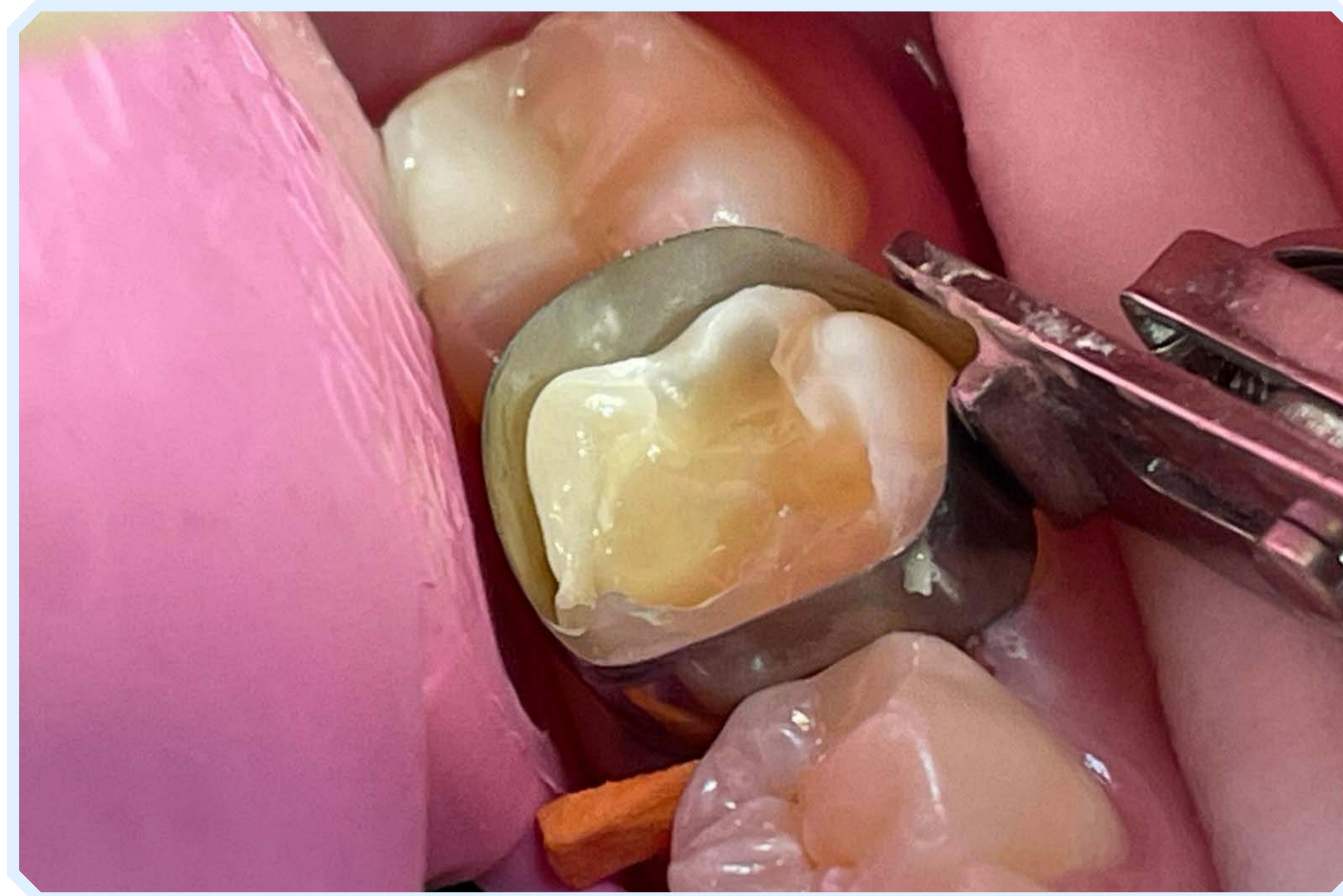

- Dno ubytku pokrywamy warstwą kompozytu FLOW-ART, aby uzyskać dokładną szczelność między kompozytem a zębem. Gwarantuje nam to jego płynna konsystencja i precyzyjna końcówka. Doskonale wypełniona przestrzeń i brak pęcherzyków powietrza eliminuje powstanie bakteryjnego mikroprzecieku i nawrotu próchnicy. Nasza praca będzie trwała, a Pacjent bezpieczny.



- Anatomiczny kształt guzków wykonujemy przy pomocy kondensowalnego kompozytu **BOSTON**. Jego wytrzymałość doskonale sprawdza się przy odbudowie zębów bocznych, które narażone są na duże siły zgryzowe. Dzięki wykorzystaniu tego materiału Pacjent może swobodnie gryźć, bez obaw o ukruszenie swojego zęba.



- Po zdjęciu formówki przechodzimy do nadania ostatecznego kształtu zęba oraz dopasowaniem go w zgryzie za pomocą kalki. Po dopasowaniu w zgryzie możemy przejść do estetycznego wykończenia naszej pracy i nadania naturalnej charakterystyki zębowi tak, aby wypełnienie nie wyróżniało się spośród pozostałych zębów, zapewniając Pacjentowi wysoką estetykę. Przed tym etapem ponownie wytrawiamy ząb.



- Zwiększenie intensywności barwy w okolicy bruzd możliwe jest dzięki cienkiej i precyzyjnej końcówce **PODBARWIACZA**. Umożliwia on nadanie naturalnego gradientu barw w zębie oraz upodobnienia wypełnienia do pozostałych zębów w łuku. Pacjent dzięki temu będzie czuł się swobodnie a my zyskamy satysfakcję z efektu wizualnego pracy.



- Zwieńczeniem pracy jest nadanie połysku. Ten krok wykonujemy przy użyciu **BOSTON GLAZURY**. Gładka powierzchnia bez konieczności polerowania mechanicznego dzięki **BOSTON GLAZURZE** jest możliwa! Pomijając ten długotrwały krok oszczędzisz czas osiągając przy tym niezwykle estetyczne wykończenie pracy!



- Efekt końcowy zabiegu leczenia zachowawczego zęba 36 przy użyciu materiałów Arkona. Ząb jest zdrowy, a uśmiech Pacjenta znów lśni! Cały zabieg nie zajmuje wiele czasu, a jest to procedura bardzo często wykonywana w gabinecie stomatologicznym. Z odpowiednimi produktami praca może być przyjemna i satysfakcjonująca.



ARKONA

➔ **TWOJE KORZYŚCI Z UŻYWANIA MATERIAŁÓW ARKONA:**



- **Zaspokojenie potrzeb i wyleczenie pacjenta - wdzięczność zaufanie**
- **Precyzyjnie dobrane składy produktów - dobra estetyka i funkcjonalność zęba na lata**
- **Oszczędność czasu procedury - satysfakcja z pracy i Twój zysk**
- **Zadowolony pacjent powraca!**



ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów



www.arkonadent.com