



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Reconstrucția dintelui 24 folosind FLOW-ART și compozit **CREATE**.



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE.

ETCHGEL, MASTERBOND, GLAZE



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- Pacientul a venit în cabinet pentru a trata o carie adâncă la dintele 24, care se extindea până la pereții de contact. Datorită rezistenței crescute a compozitului **CREATE**, suntem capabili să reconstruim permanent chiar și un dinte foarte deteriorat, fără a fi nevoie de colaborarea cu un laborator protetic.





ETAPA 2



ARKONA



- Mai întâi, suprafața trebuie pregătită corespunzător. Pentru aceasta, demineralizăm dentina timp de 10 secunde și smalțul timp de 30 de secunde cu **ETCHGEL**, iar datorită vârfului său precis, acidul va ajunge doar în locurile dorite.
- Apoi, clătim temeinic, usucăm și aplicăm **MASTERBOND** pentru a permite compozitului să adere la țesuturile dintelui și pentru a asigura durabilitatea pe termen lung a plombei.





ETAPA 3



ARKONA



- Acoperim stratul cel mai adânc al defectului cu un strat de compozit FLOW-ART pentru a obține o etanșare precisă și o tranziție netedă a umplerii pe peretele lateral. Consistența materialului face ca acesta să umple perfect spațiul și să protejeze plomba de bulele de aer și micro-scurgerile de bacterii.





ETAPA 4



ARKONA



- Putem reconstrui ușor pereții lipsă ai dintelui folosind compozit **CREATE**. Confortul lucrului oferit de compoziția atent aleasă a materialului de umplură ne garantează netezirea suprafeței după polimerizare și confortul reconstrucției fiecărui vârf individual.






ETAPA 5



ARKONA

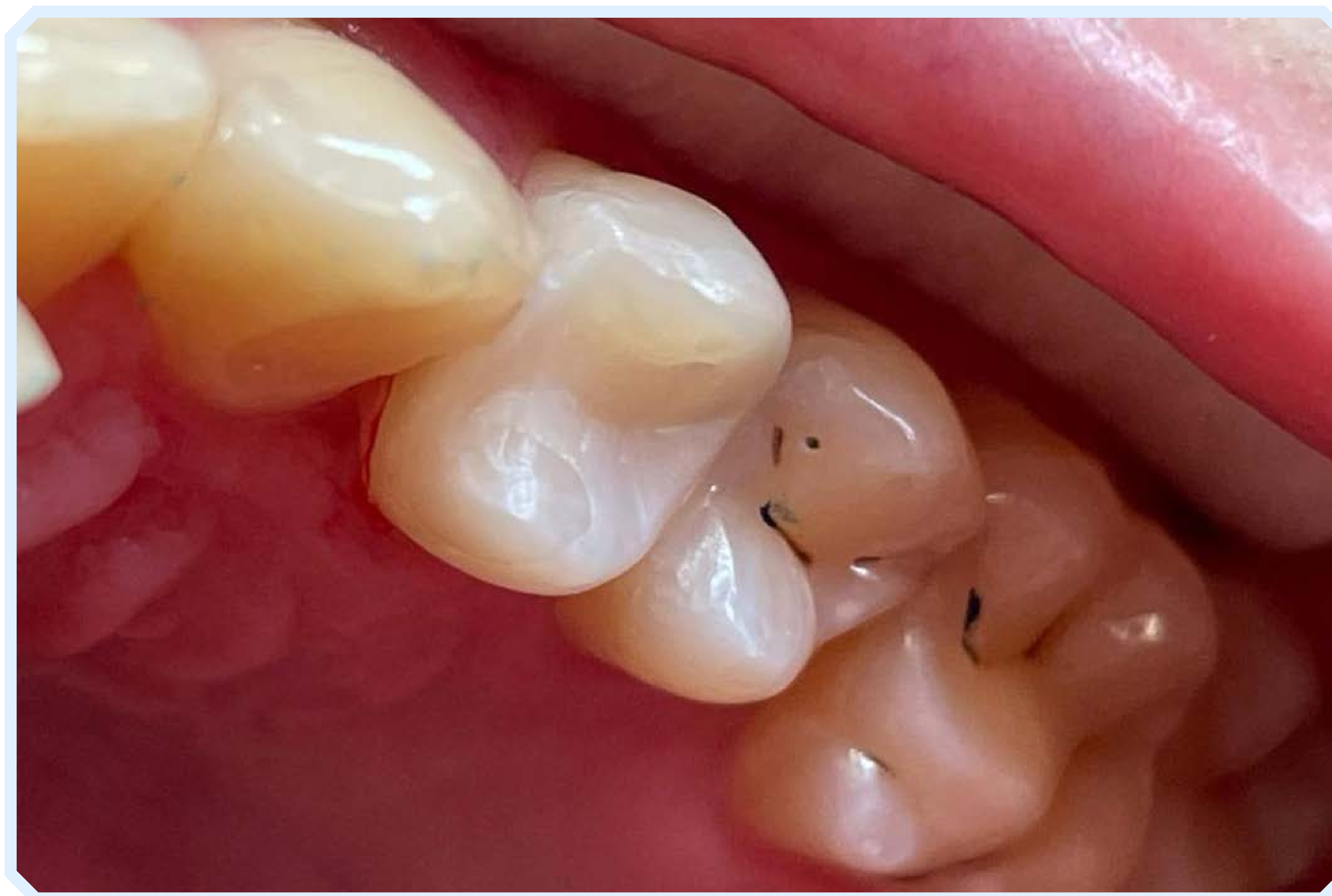

- După îndepărtarea formei, dăm dintele forma finală și îl ajustăm în mușcătură folosind hârtie de trasare. Când dintele ajunge la contactul corect cu dinții opuși, putem continua cu finisarea lucrării.





ETAPA 6



ARKONA



- Pentru a face acest lucru, demineralizăm dintele din nou cu **ETCHGEL**, astfel încât suprafața dintelui și a plombei să se integreze cu **GLAZE**, asigurând protecția plombei și netezirea întregii suprafețe a dintelui pentru mulți ani.





ETAPA 7



ARKONA



- Folosind **GLAZE** economisește timpul nostru de lucru, deoarece pentru a obține strălucirea perfectă nu trebuie să lustruim dintele până la final, expunându-l la supraîncălzire. Această etapă scurtă din întreaga procedură garantează satisfacția pacientului cu efectul final și le oferă o senzație confortabilă în cavitatea bucală.





BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ FOLOSIND FLOW-ART & CREATE



ARKONA



- **Tratament eficient al cariilor dentare,** sănătatea și siguranța pacientului
- **Etanșeitate perfectă și de lungă durată a plombei** – recunoștința pacientului
- **Estetică bună și economisirea timpului în procedură** – satisfacția muncii și profitul dumneavoastră
- **Un pacient mulțumit se întoarce!**



www.arkonadent.com



ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com