



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Marcarea orificiilor canalelor cu compozit **FLOW-COLOR**



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE.



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- Pacienții se confruntă adesea cu afecțiuni dentare mai serioase, cum ar fi cariile extinse. Acestea necesită frecvent intervenții endodontice pe care nu le-am planificat dinainte. Trebuie, așadar, să pregătim corespunzător dinții tratați pentru tratamentul endodontic ulterior și să îi protejăm până la următoarea vizită a pacientului.





ETAPA 1



ARKONA



- Pregătim cu atenție dintele și îndepărtăm toate țesuturile afectate de carie. În astfel de proceduri, se poate constata că leziunea carioasă afectează și pulpa, ceea ce necesită tratarea țesuturilor moi infectate ale dintelui. Aceste situații apar frecvent în timpul vizitelor mai scurte, când nu dispunem de suficient timp pentru a pregăti și obtura corect și meticulos canalele. În astfel de cazuri, ar trebui să marcăm și să protejăm orificiile canalelor, pentru a ne ușura și scurta intervenția la următoarea vizită.





ETAPA 2



ARKONA



- Un compozit „flow” colorat, mereu la îndemână, este ideal pentru o astfel de procedură. Acesta facilitează diagnosticul în timpul retratamentului dintelui. Gama largă de culori disponibile poate îmbunătăți organizarea muncii noastre, datorită respectării conștincioase a marcării cazurilor specifice cu o anumită culoare. Cel mai important este faptul că utilizarea produsului este rapidă și funcțională pentru noi.





ETAPA 3



ARKONA



- După utilizarea FLOW-COLOR, la redeschiderea dintelui, continuarea tratamentului va fi mult mai rapidă, iar munca noastră mai eficientă. FLOW-COLOR poate fi folosit și ca strat de diferențiere sub restaurările provizorii după tratamentul endodontic. Acest pas rapid va proteja dinții pacientului de o preparare excesivă ulterioară, astfel încât veți economisi timpul pacientului petrecut pe scaun și veți câștiga recunoștința și încrederea acestuia.





DE CE SĂ FOLOSIM FLOW-COLOR?



ARKONA



- Vei economisi timpul tău și al pacientului
- Cu un cost redus, îți vei ușura munca
- Vei organiza mai bine procedurile pe care le efectuezi
- Un pacient mulțumit și loial este profitul tău!



www.arkonadent.com



ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com