



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Sigilarea dintelui 36 cu FLOW-COLOR și ETCHGEL, pacient de 11 ani



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE.

MASTERBOND



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- La pacienții tineri, observăm adesea că nivelul de curățare a dinților nu este atât de amănunțit pe cât ne-am aștepta. În locuri greu accesibile, cum ar fi șanțurile și fosetele din dinții laterali, observăm stadiile inițiale ale cariilor - decalcificarea. Pentru a preveni evoluția cariilor, putem efectua o procedură de sigilare. Folosind sigilantul colorat FLOW-COLOR, putem proteja eficient dinții pacientului, oferind în același timp „micuțului” pacient distracția de a se juca cu culorile. Un pacient mulțumit și părinții săi sunt cheia unui pacient care se întoarce și recomandă dentistul.





ETAPA 1



ARKONA



- Dintele trebuie curățat și uscat înainte de aplicarea agentului de demineralizare. Consistența de gel a **ETCHGEL** și vârful precis ne permit să aplicăm produsul doar în locurile dorite. Acest lucru protejează dintele pacientului de demineralizarea inutilă a unei suprafețe prea mari de smalț dentar și a țesuturilor moi ale cavității bucale. Datorită acestor caracteristici ale materialului, timpul procedurii este mai scurt și confortul lucrului nostru este mai mare.





ETAPA 2



ARKONA



- Lăsăm **ETCHGEL** pe dinte aproximativ 30 de secunde, apoi îl clătim cu un flux mare de apă pentru a ne asigura că nu rămâne material în gura pacientului. Datorită acestei proceduri scurte, suprafața dintelui demineralizat capătă o umiditate mai bună din partea sistemului adeziv, ceea ce ne va permite să obținem o legătură mai bună cu sigilantul **FLOW-COLOR**.





ETAPA 3



ARKONA



- Suprafața smalțului demineralizat are o nuanță mai albă decât culoarea naturală a dinților, ceea ce conturează zona corectă pentru aplicarea **MASTERBOND** și apoi a sigilantului **FLOW-COLOR**.





ETAPA 4



ARKONA



- Înainte de aplicarea sistemului adeziv, uscați bine dintele.





ETAPA 5



ARKONA



- **MASTERBOND** se freacă cu grijă timp de câteva secunde pentru a asigura acoperirea completă a suprafeței demineralizate cu sistemul adeziv. Acest lucru va asigura o aderență corespunzătoare a sigilantului **FLOW-COLOR** pe dinte, garantând astfel o legătură permanentă între substanțe.






ETAPA 6



ARKONA

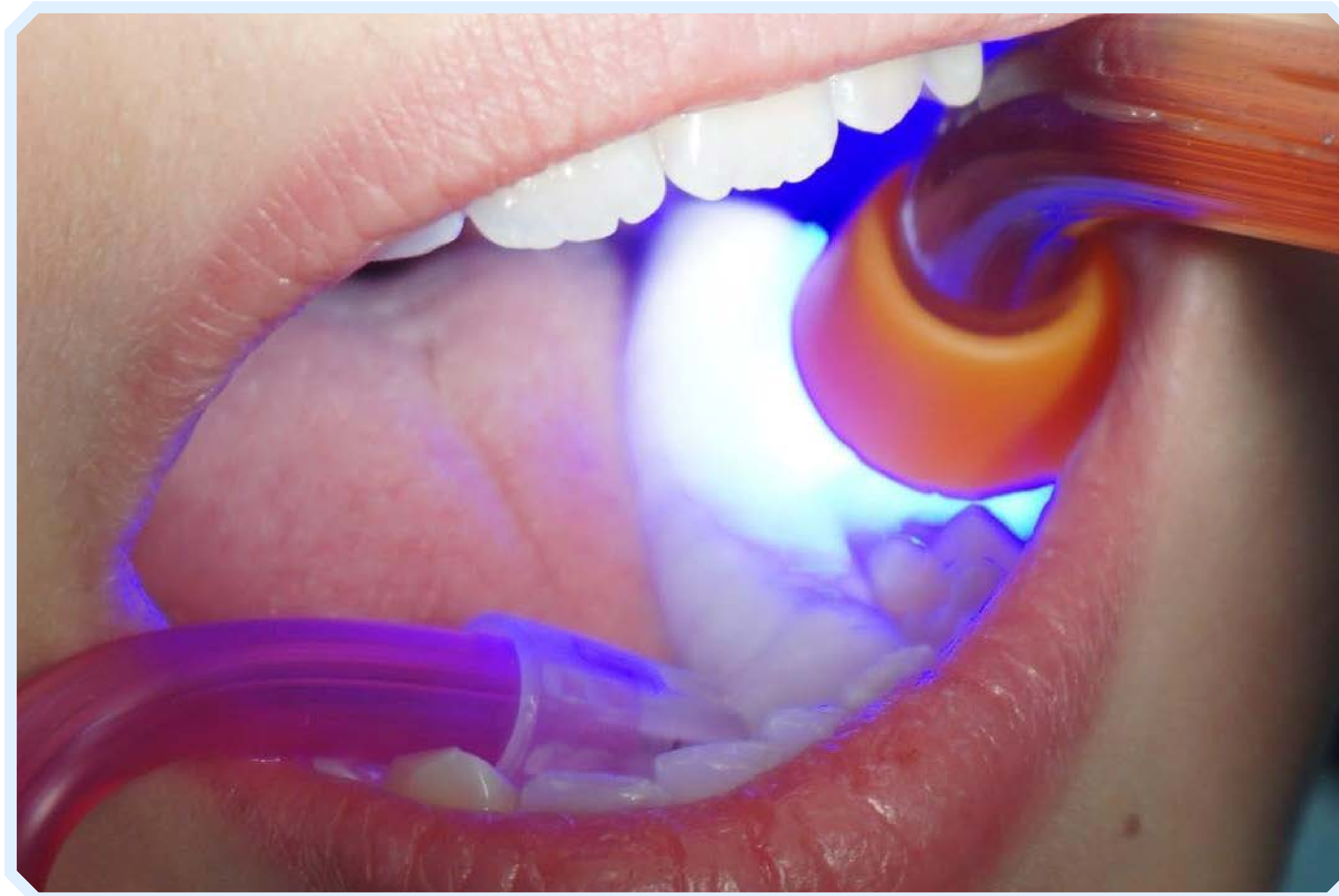

- Înainte de polimerizare, suflăm ușor asupra **MASTERBOND**-ului aplicat anterior pentru a permite evaporarea alcoolului.
- Apoi, polimerizăm dintele timp de 10-15 secunde, în funcție de parametrii lămpii noastre.





ETAPA 7



ARKONA



- Când dintele este pregătit corespunzător, putem trece la aplicarea FLOW-COLOR. Aplicăm un strat subțire de material rapid și precis, ceea ce este posibil datorită vârfului subțire, adaptat pentru lucrul în zona dinților posteriori. Datorită pigmentației colorate a sigilantului, „micii” noștri pacienți și părinții lor pot controla procesul de abraziune a sigilantului, ceea ce le indică momentul când trebuie să se întoarcă pentru a repeta procedura.





ETAPA 8



ARKONA



- Prin repetarea sistematică a procedurii, dinții sigilați vor fi protejați permanent. Procedura de sigilare este rapidă și eficientă.
- Prevenirea cariilor amână tratamentele dentare mai invazive pentru pacientul dumneavoastră. Veți petrece puțin timp pe sigilare sau puteți delega lucrarea unui igienist, iar astfel veți adăuga o procedură nouă în portofoliul dumneavoastră și veți avea pacienți mulțumiți care se vor întoarce.





DE CE MERITĂ SĂ FOLOSIM SIGILANT COLORAT?



ARKONA



- Procedură ușoară și rapidă
- Procedură neinvazivă, cu cost redus
- Distracție cu culoare, bucurie și loialitate din partea „micilor” pacienți!
- Control ușor al sigilantului după procedură, chiar și de către părinți și copii
- Un client mulțumit și entuziasmat este profitul tău!



www.arkonadent.com



ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com