




Sigilarea dintelui 17 utilizând SEALPRIME și ETCHGEL, la un pacient în vârstă de 18 ani



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE.



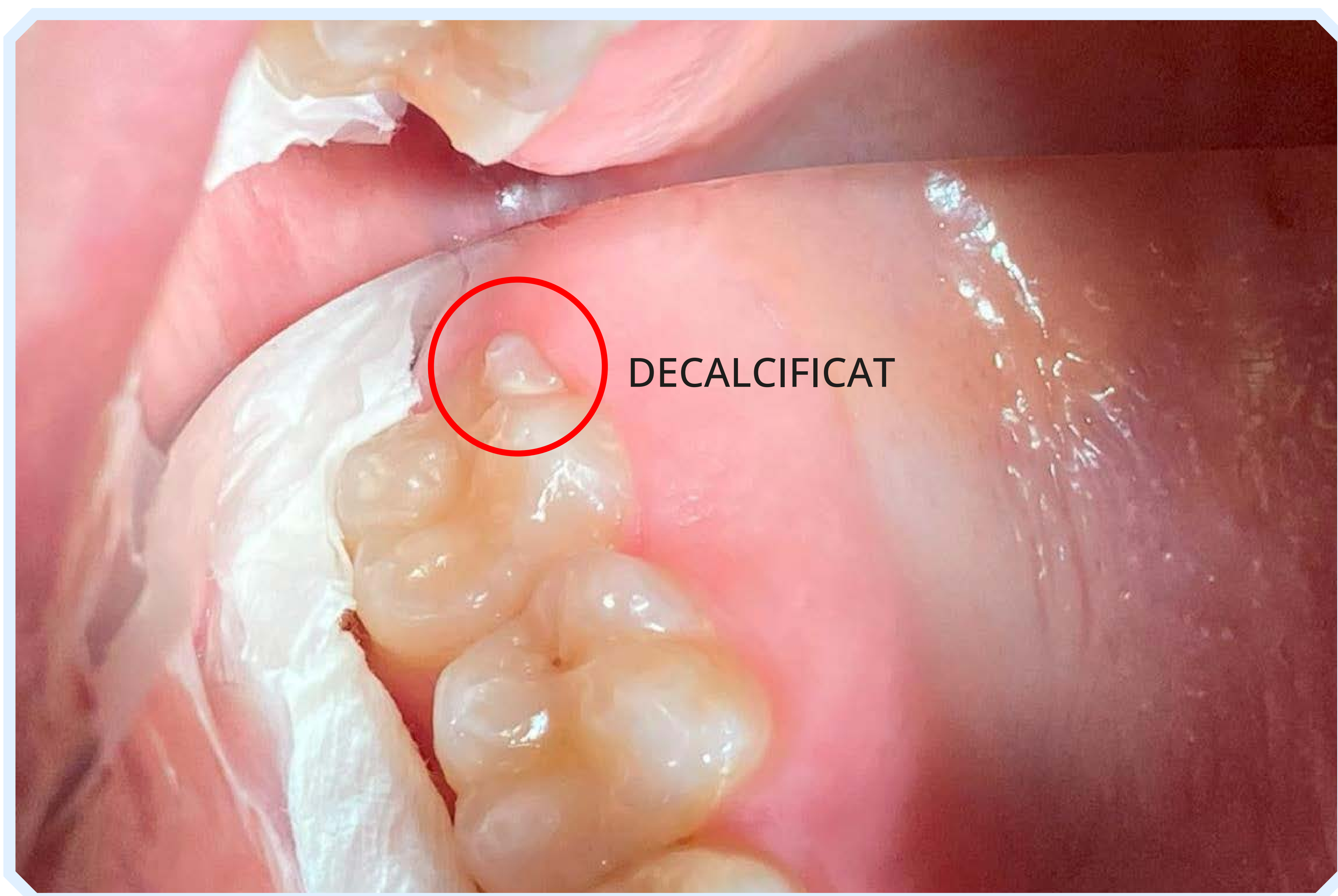

- Un fenomen frecvent observat, mai ales la pacienții noștri mai tineri, este apariția decalcificărilor, care indică stadiul inițial al cariilor.
- Le observăm de obicei în zone greu accesibile ale cavității bucale, adică în șanțurile și fosetele din dinții laterali. Am întâlnit o astfel de situație la pacientul nostru de 18 ani.





ETAPA 1



ARKONA



- Aplicăm **ETCHGEL** pe suprafața curățată și uscată a șanțurilor și fosețelor, pregătind astfel suprafața smalțului pentru aplicarea **SEALPRIM**.
- Datorită consistenței de gel a materialului, putem distribui cu precizie produsul, fără a provoca demineralizarea necontrolată a zonelor de smalț pe care nu dorim să le afectăm.
- Suprafețele de smalț demineralizate devin de culoare albă cretoasă, ceea ce ne ajută să aplicăm cu precizie sigilantul pe suprafața dintelui. Consistența lichidă a produsului asigură un lucru confortabil, iar aplicatorul de unică folosință garantează siguranța pacienților noștri și crește standardul serviciilor oferite.





ETAPA 2



ARKONA



- După polimerizarea materialului, avem un dinte protejat împotriva cariilor. Întregul proces durează doar 15 minute! Sigilarea ne economisește timp și face munca mai ușoară. Economisim stresul și durerea pacienților, câștigând astfel încrederea acestora și recunoștința părinților pentru protejarea dinților copiilor lor.





DE CE MERITĂ SĂ FOLOSIM SIGILANT COLORAT?



ARKONA



- Poți efectua procedura rapid și ușor
- Procedură neinvazivă, cu cost redus
- Mai puțin stres pentru tine legat de „suferința” pacientului
- Un client mulțumit și entuziasmat este profitul tău!



www.arkonadent.com



ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com