



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Realizarea unei gutiere de stabilizare a dinților arcadei inferioare pe baza **COMCORD** pe dinții 33-43



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE

ETCHGEL



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- Problemele cu care se confruntă pacienții cu boală parodontală sunt pierderea osului alveolar, ceea ce determină scăderea marginii gingivale și mobilitatea și instabilitatea dinților. O astfel de situație necesită intervenție de urgență din partea unui specialist pentru a imobiliza și fixa dinții.
- O metodă dovedită în astfel de cazuri este utilizarea **COMCORD** pentru a fixa dinții mobili.
- Problema este apoi rezolvată într-un mod foarte estetic, oferind pacientului un sentiment de siguranță și încredere în sine.





ETAPA 1 – PREGĂTIREA PENTRU PROCEDURĂ



ARKONA



- Înainte de a începe convergența, măsurăm o secțiune de **COMCORD**, puțin mai lungă decât secțiunea din arcadă. Dinții care vor fi conectați cu gutiera compozită sunt demineralizați folosind **ETCHGEL**. Apoi, aceștia sunt uscați temeinic.





ETAPA 2 – STABILIZAREA DINȚILOR ÎN ARCADĂ



ARKONA



- Înainte de aplicarea sistemului adeziv, dinții trebuie stabiliți folosind pene. Acest lucru va permite aplicarea precisă și confortabilă a **COMCORD** și va preveni pătrunderea materialului compozit în locuri greu de curățat.





ETAPA 3 – APLICAREA COMCORD



ARKONA



- După ce dinții au fost pregătiți corespunzător, o secțiune măsurată de **COMCORD** trebuie plasată treptat pe dinții arcadei inferioare. Fragmentul este introdus și în spațiile interdentală, iar fiecare dinte trebuie fixat pe trei laturi cu **COMCORD**. Apoi trecem la modelare pentru ca, **COMCORD** să adere precis la dinte, asigurând o suprafață netedă.





ETAPA 4 – ADAPTAREA ÎN OCLUZIE



ARKONA



- Pentru ca gutiera să funcționeze corespunzător, dinții trebuie ajustați în ocluzie folosind hârtie de urmărire, asigurând contact egal. Cu o igienă corespunzătoare, procesul de mobilizare nu va progresa, iar dinții vor rămâne stabili și protejați pentru mulți ani!





- **Stabilizarea dintelui în arcada dentară într**
- o singură vizită și fără intervenție invazivă
- **Satisfacerea nevoilor pacientului** - recunoștință și satisfacție
- **Ușurința în efectuarea corecțiilor** - estetică și funcționalitate bună a dintelui pe o perioadă lungă de timp
- **Economisirea timpului în timpul procedurii**
- profitul dumneavoastră
- **Posibilitatea de a trata pacienții pe care i**
- am pierdut până acum din diverse motive





ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com