



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Plombă compozită în dintele 25



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE

ETCHGEL • CREATE • FLOW-ART • MASTERBOND • GLAZE



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- Pacientul a venit la cabinet pentru tratamentul dintelui 25. Țesuturile afectate de carie au fost procesate, iar dintele va fi asigurat pentru reconstrucție. Datorită confortului oferit de utilizarea materialelor necesare pentru completarea țesuturilor, plombarea cavității extinse de clasa a doua a durat mai puțin de o oră. Această economisire de timp ne garantează satisfacția și recunoștința pacienților noștri.






ETAPA 1



ARKONA

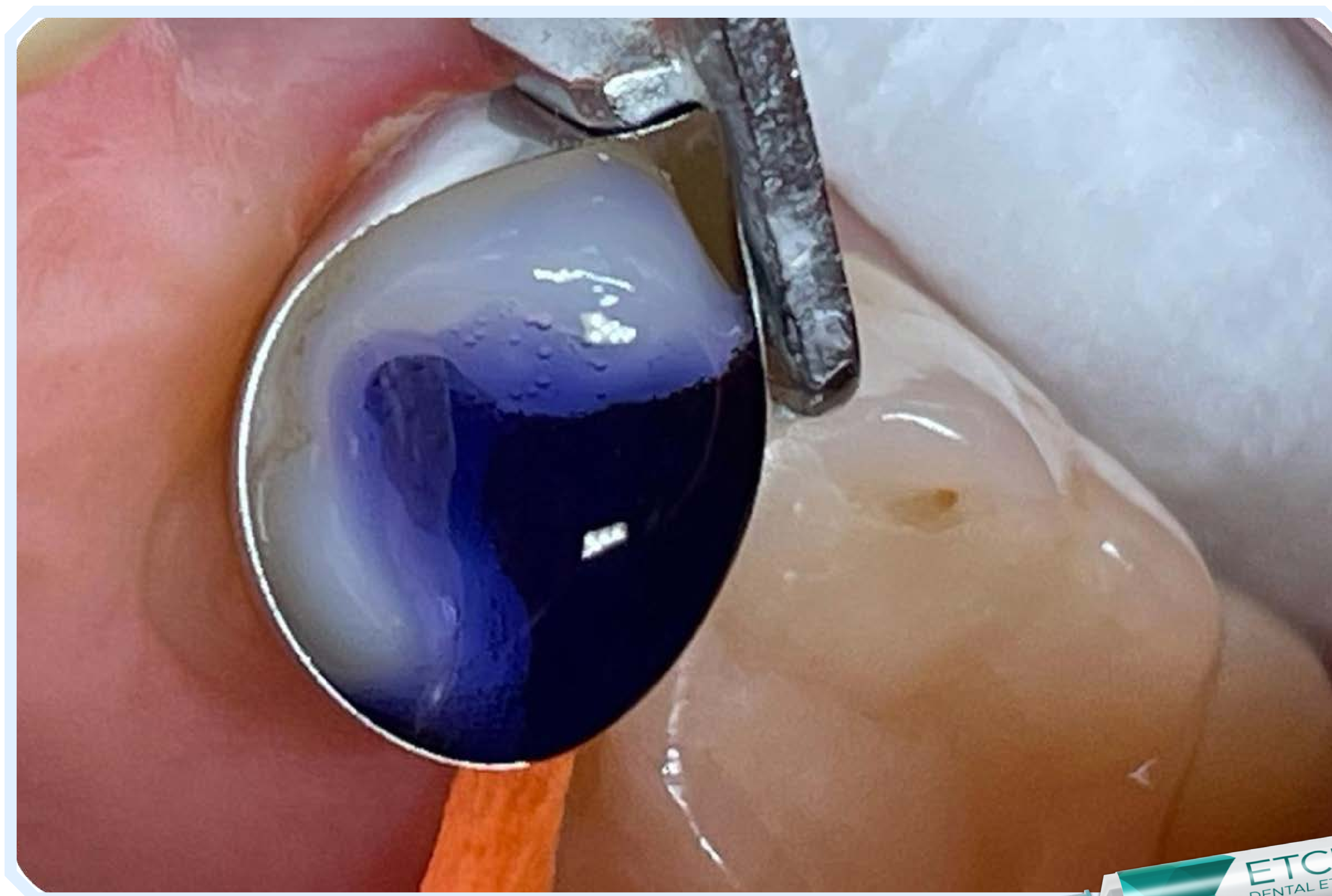

- După plasarea formei și asigurarea dintelui cu o pană, demineralizăm dentina cu **ETCHGEL** timp de 10 secunde și smalțul timp de 30 de secunde, apoi clătim temeinic substanța cu o seringă cu aer. Acidul fosforic, care este componentul principal al substanței de demineralizare, îndepărtează stratul de șlefuire care împiedică crearea unei restaurări permanente.





ETAPA 2



ARKONA



- Demineralizarea este un pas esențial în realizarea unei plombe, deoarece asigură o penetrare temeinică a sistemului adeziv, ceea ce determină aderența compozitului la țesuturile proprii ale pacientului.





ETAPA 3



ARKONA



- Aplicăm **MASTERBOND** pe țesuturile demineralizate și uscate, având grijă să frecăm bine lichidul pe suprafața dintelui. Acest lucru va asigura aderența materialului la țesuturile dintelui. Apoi, iradiem dintele timp de 15 secunde și trecem la modelarea cu compozit. Această etapă extrem de importantă va asigura faptul că pacienții vor avea plombe care vor dura mulți ani.






ETAPA 4



ARKONA

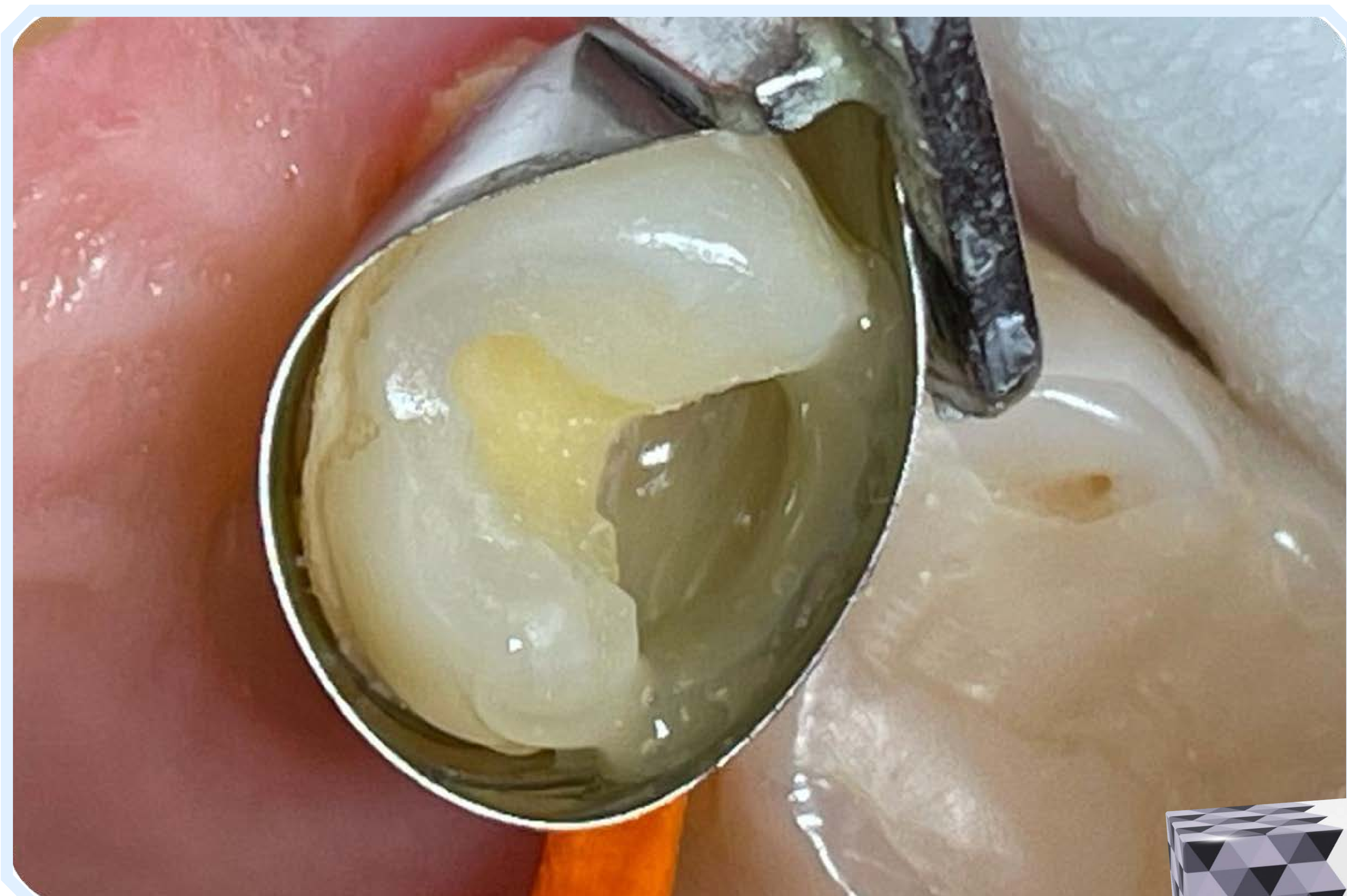

- Pentru a preveni formarea de proeminențe la baza cavitații, aplicăm compozitul FLOW-ART. Consistența sa lichidă și vârful precis vor asigura etanșeitatea excelentă a lucrării, confortul și un timp de lucru rapid, fără a fi necesar să îndepărtăm material la punctul de contact dintre dinte și plombă.





ETAPA 5



ARKONA



- Reconstruim țesuturile rămase cu compozitul **CREATE**. Rezistența sa mare și plasticitatea, asigurate de compoziția atent aleasă a umpluturii, garantează siguranța și durabilitatea lucrării, care sunt cele mai importante pentru pacienți și le permit să muște liber.





ETAPA 6



ARKONA



- După îndepărtarea formei, dăm dintelui forma finală și îl ajustăm în mușcătură folosind hârtie de articulație, astfel încât pacientul să se simtă confortabil în noua situație. După obținerea unui efect satisfăcător, putem trece la ultimul pas, care este să conferim lucrării noastre luciu!






ETAPA 7



ARKONA

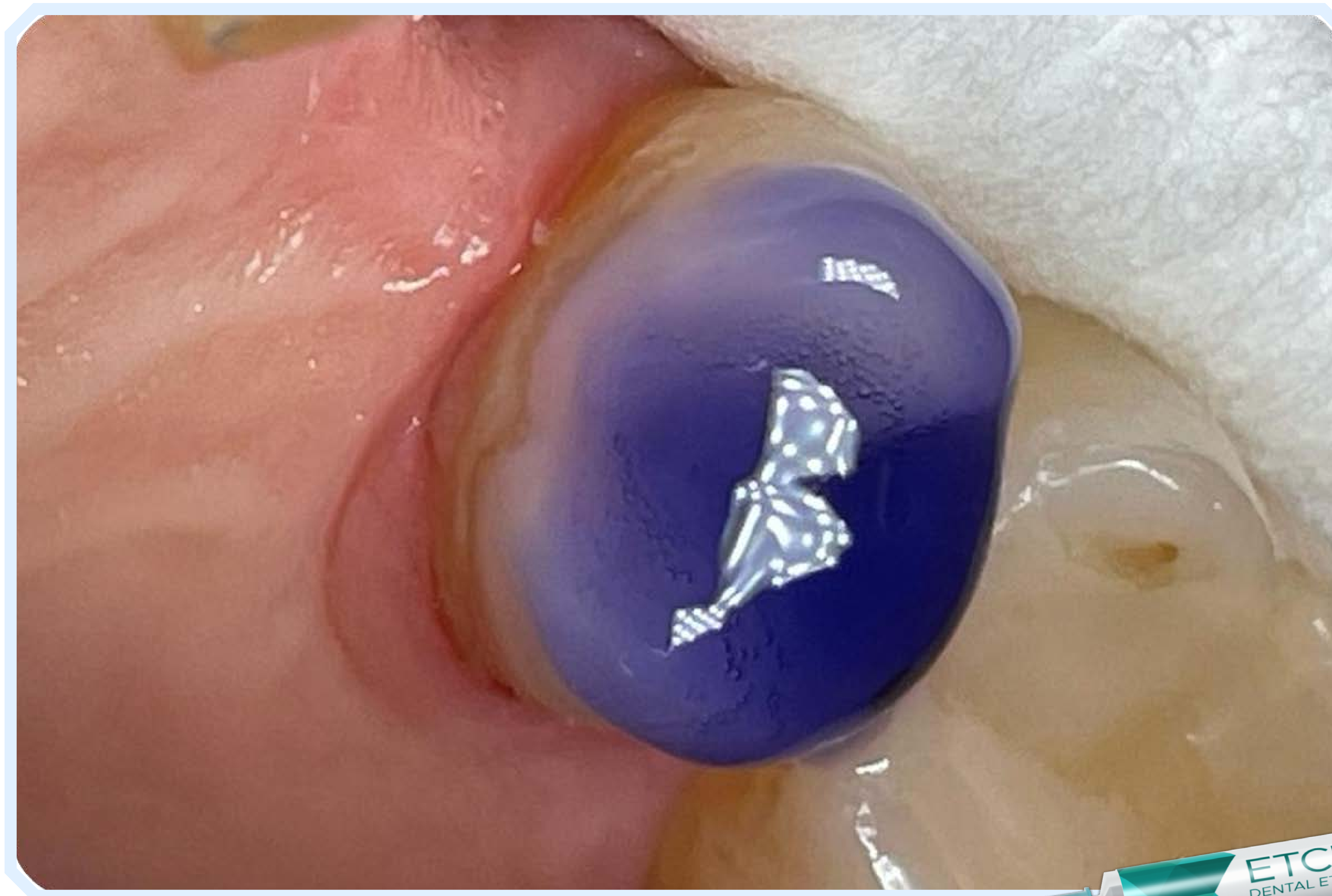

- Înainte de a aplica adezivul **GLAZE**, demineralizăm dintele din nou cu **ETCHGEL**, acest lucru va asigura o legătură permanentă a materialului cu dintele și compozitul, economisindu-ne timp pentru polisarea mecanică.
- Pacientul va primi apoi un zâmbet estetic, strălucitor și sănătos pentru mulți ani!





EFFECTUL FINAL



ARKONA



- Efectele vizuale ale utilizării **GLAZE** în combinație cu compozitul **CREATE** în practica dentară. Munca intuitivă și confortabilă cu aceste materiale va economisi timpul de lucru și va crește satisfacția pacienților dumneavoastră.



www.arkonadent.com



BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ DIN UTILIZAREA MATERIALOR ARKONA



ARKONA



- **Satisfacția nevoilor pacientului** - recunoștință, încredere
- **Compoziții de produse atent selectate** - estetică și funcționalitate bună a dintelui pentru mulți ani
- **Economisirea timpului în timpul procedurii** - profitul dumneavoastră
- **Un pacient mulțumit se întoarce!**



www.arkonadent.com



ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com