



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Plombă compozită în dintele 36.



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE

ETCHGEL • MASTERBOND • COLOURANT • FLOW-ART • CREATE • GLAZE



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- Scopul vizitei pacientului a fost tratamentul unui defect carios și restaurarea dintelui 36. Acesta dorea să obțină efectul unui dinte natural.





ETAPA 1



ARKONA



- Îndepărtăm țesuturile carioase și plasăm o formă pe dinte pentru a proteja și reconstrui precis pereții de contact. Pregătirea atentă a zonei de lucru scurtează etapele ulterioare ale lucrării și facilitează realizarea reconstrucției anatomice. Timpul mai scurt petrecut de pacient pe scaun va conduce la satisfacția acestuia și va contribui la construirea încrederii în medicul stomatolog.





ETAPA 2



ARKONA



- După plasarea forme și asigurarea acesteia cu o pană, demineralizăm dintele cu **ETCHGEL** timp de 10 secunde pentru dentină și 30 de secunde pentru smalț, apoi clătim temeinic defectul cu apă și îl usucăm. Etapa de îndepărtare a stratului de șlefuire, datorită demineralizării, determină o bună penetrare a adezivului și aderența întregii plombe la țesutul dintelui. Aceasta garantează durabilitatea lucrării pentru mulți ani.






ETAPA 3



ARKONA

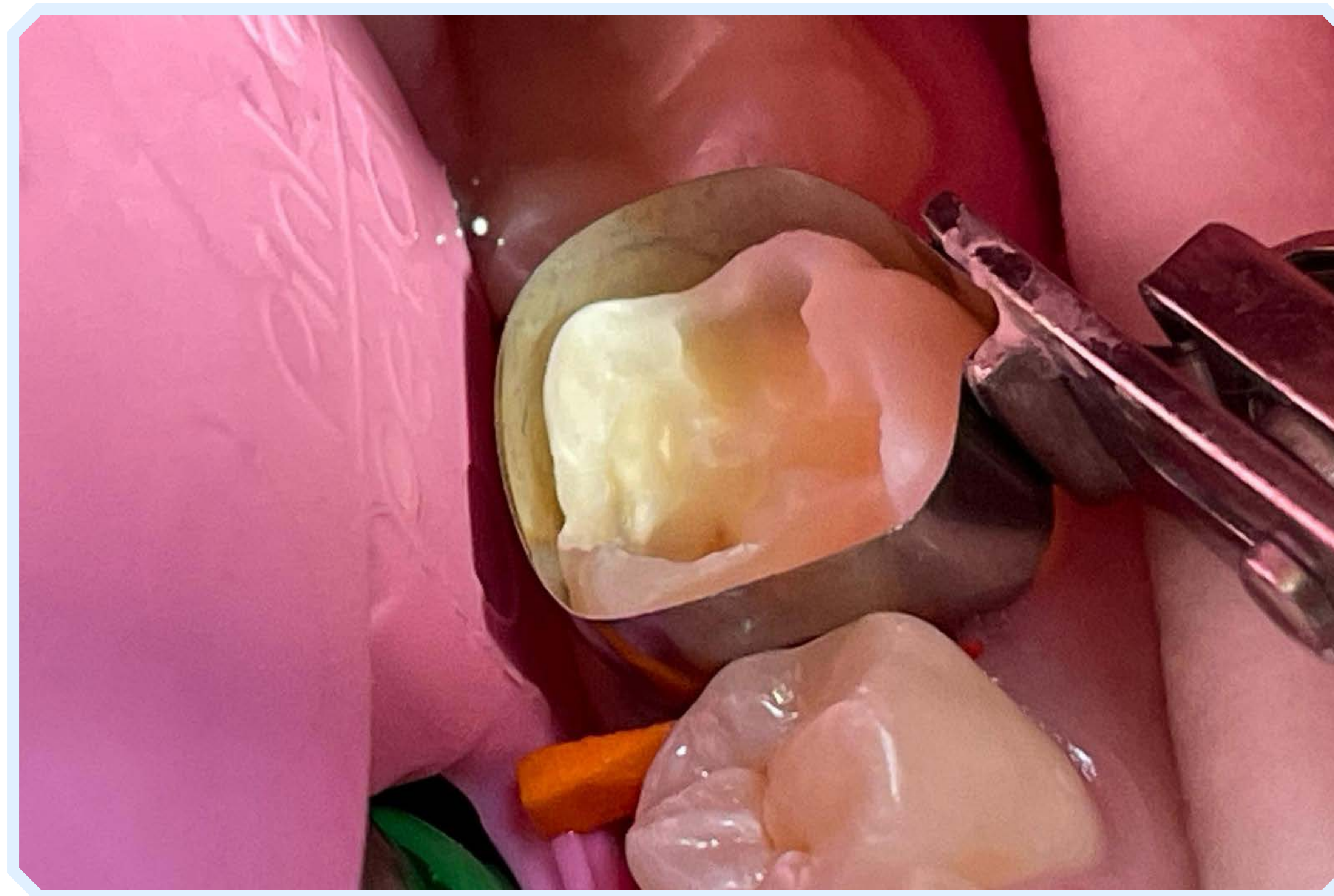

- Un dinte curățat, demineralizat și uscat este pregătit pentru aplicarea unui sistem adeziv. Datorită acestei pregătiri, materialele aplicate vor fi distribuite ușor pe dinte, iar lucrarea va fi confortabilă și fără probleme.






ETAPA 4



ARKONA

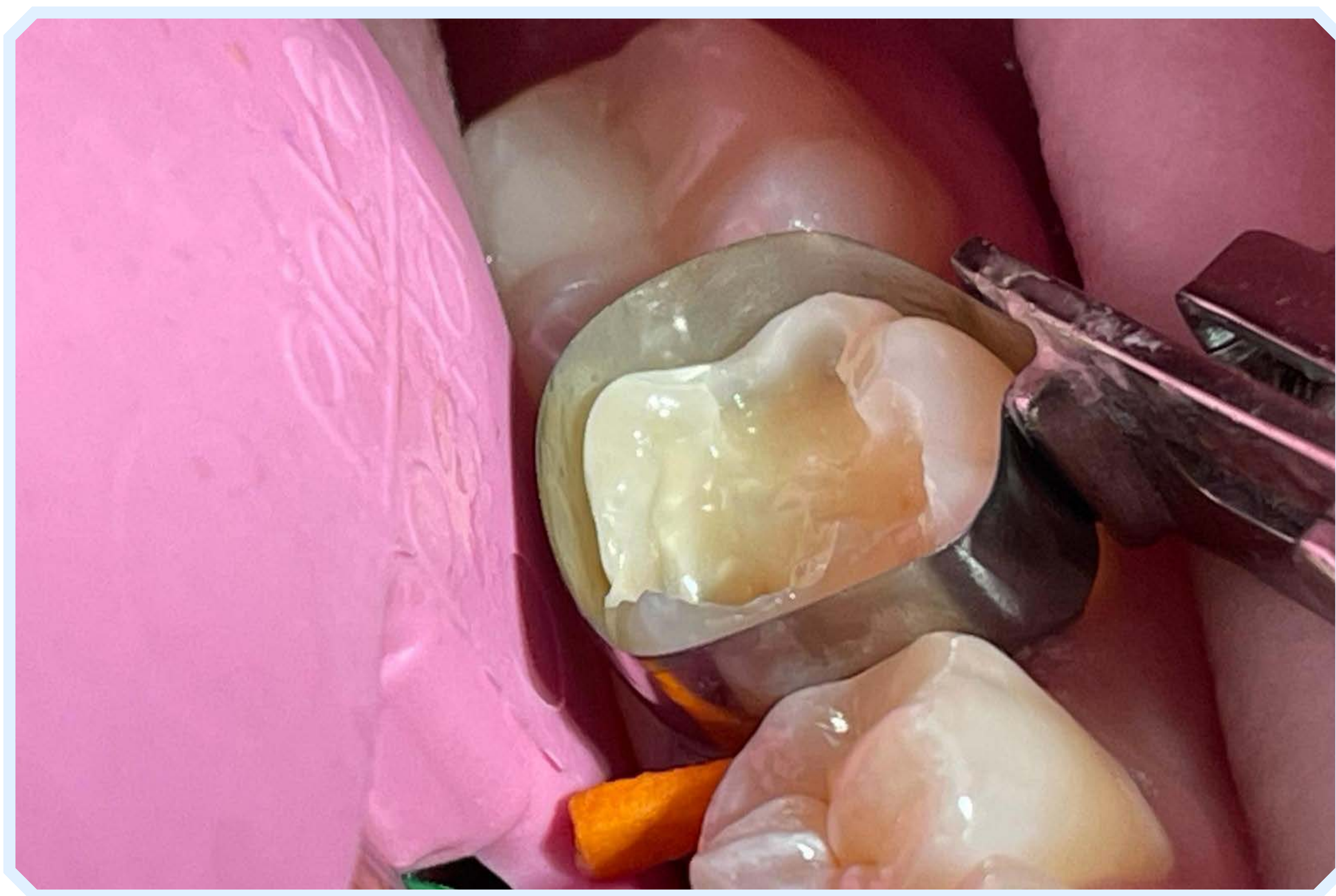

- Frecați temeinic sistemul adeziv **MASTERBOND**. Apoi, îl usucăm ușor pentru a permite evaporarea solventului și iradiem dinte timp de 15 secunde. Această etapă este extrem de importantă în întregul proces de reconstrucție, deoarece leagă permanent materialul compozit de țesuturile dintelui, fără a fi necesară o prelucrare excesiv de invazivă a țesuturilor pacientului.






ETAPA 5



ARKONA

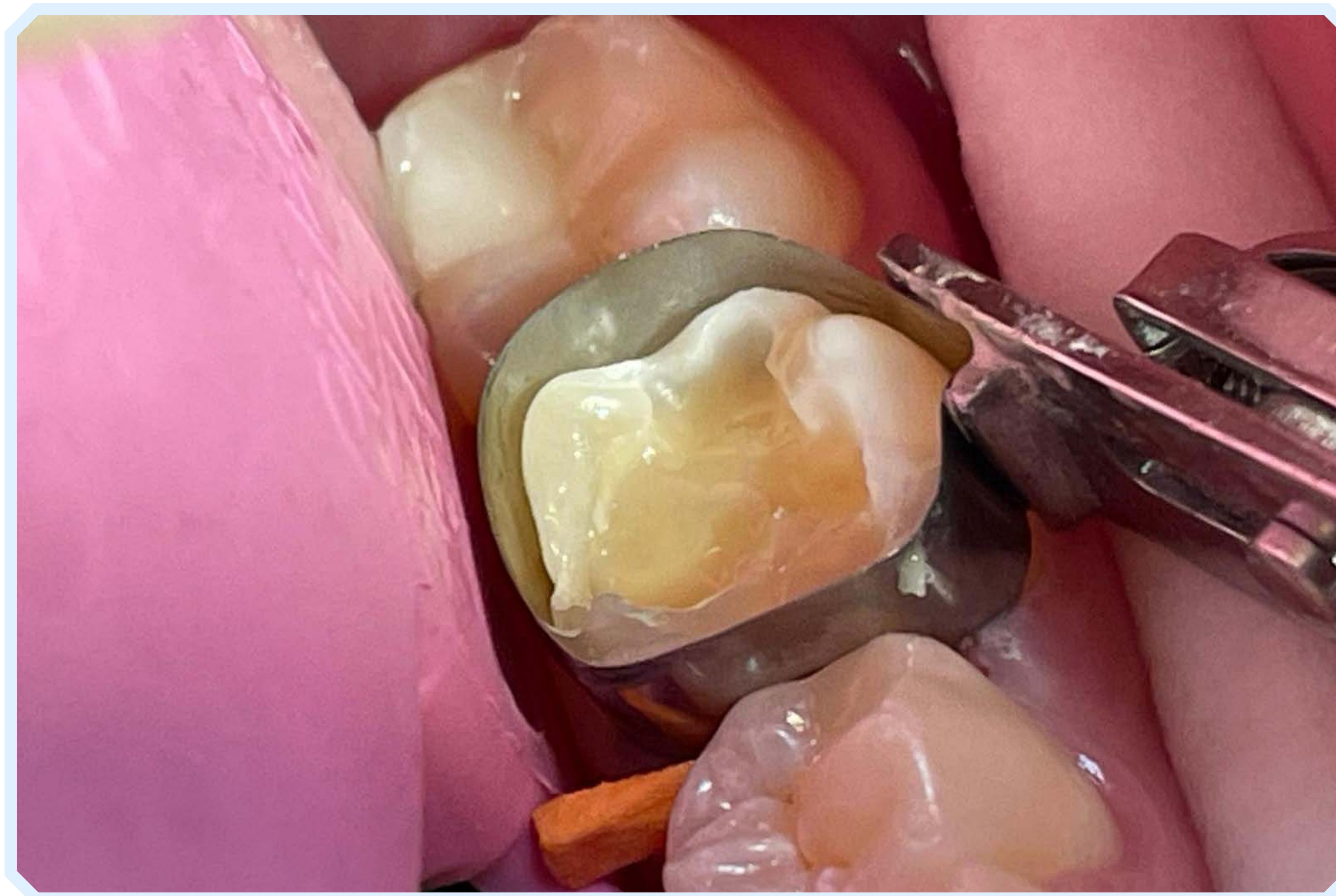

- Acoperim fundul cavității cu un strat de compozit FLOW-ART pentru a obține o etanșare precisă între compozit și dinte. Acest lucru este garantat de consistența sa lichidă și de vârful precis. Spațiul perfect umplut și lipsa bulelor de aer elimină formarea micropermeabilității bacteriene și recidiva cariilor. Lucrarea noastră va fi durabilă și pacientul va fi în siguranță.





ETAPA 6



ARKONA



- Forma anatomică a vârfurilor este realizată utilizând compozitul condensabil **CREATE**. Rezistența sa este perfectă pentru reconstrucția dinților posteriori, care sunt expuși la forțe mari de mușcătură. Datorită utilizării acestui material, pacientul poate mușca liber, fără a se preocupa că își va ciobi dintele.





ETAPA 7



ARKONA



- După îndepărtarea formei, procedăm la conferirea formei finale dintelui și la ajustarea acestuia în mușcătură folosind hârtie de trasare. După ajustarea mușcăturii, putem trece la finisajul estetic al lucrării noastre și să dăm dintelui un caracter natural, astfel încât plomba să nu iasă în evidență față de ceilalți dinți, oferind pacientului un aspect estetic de înaltă calitate. Înainte de această etapă, demineralizăm dintele din nou.





ETAPA 8



ARKONA



- Creșterea intensității culorii în zona șanțurilor este posibilă datorită vârfului subțire și precis al **COLOURANT**-ului. Acesta permite obținerea unui gradient de culoare natural în dinte și realizarea plombei similară cu ceilalți dinți din arcadă. Datorită acestui lucru, pacientul se va simți confortabil, iar noi vom obține satisfacție din efectul vizual al lucrării.





ETAPA 9



ARKONA



- Finalizarea lucrării constă în aplicarea luciului. Această etapă se realizează utilizând **GLAZE**. O suprafață netedă, fără a fi necesară polizarea mecanică, este posibilă datorită **GLAZE**! Ocolind acest pas de durată, vei economisi timp, obținând totodată un finisaj extrem de estetic al lucrării!





ETAPA 10



ARKONA



- Efectul final al tratamentului conservator al dintelui 36 utilizând materiale Arkona. Dintul este sănătos și zâmbetul pacientului strălucește din nou! Întreaga procedură nu necesită mult timp și este o procedură foarte frecvent efectuată într-un cabinet stomatologic. Cu produsele potrivite, lucrarea poate fi plăcută și satisfăcătoare.





BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ DIN UTILIZAREA MATERIALOR ARKONA



ARKONA



- **Satisfacția nevoilor pacientului și recunoștința pentru vindecare**
- **Compoziții de produse atent selectate, estetica și funcționalitatea dintelui pe termen lung**
- **Economisirea timpului în timpul procedurii – satisfacție în muncă și profitul dumneavoastră**
- **Un pacient mulțumit se întoarce!**



www.arkonadent.com



ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com