



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Realizarea unei plombe compozite în dintele 84



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE

FLOW-COLOR • ETCHGEL • MASTERBOND



www.arkonadent.com



- Fotografia prezintă starea inițială.

- Pacienții tineri care vizitează cabinetele stomatologice nu sunt întotdeauna dornici să colaboreze cu dentistul, iar câștigarea încrederii lor poate fi o provocare. În astfel de situații, atenția ar trebui să fie îndreptată către construirea unei relații cu pacientul, iar lucrarea trebuie să fie eficientă și să includă cât mai puține etape posibile pentru a profita de atenția scurtă a pacientului. Scopul nostru ar trebui să fie oferirea unei soluții optime și de lungă durată pacientului.
- Într-un astfel de caz, utilizarea compozitului FLOW-COLOR este o alegere excelentă. Acesta funcționează foarte bine pentru pacienții tineri deoarece permite copilului să aleagă culoarea plombei. Acest element de joc sporește încrederea și îmbunătățește cooperarea pacientului. În cazul cariilor dentare în dintele 84, a fost utilizat FLOW-COLOR.





ARKONA



ETAPA 1 - IZOLAREA RAPIDĂ A ZONEI DE LUCRU



- Protejarea zonei de lucru de umiditate este un pas esențial, mai ales în cazul pacienților tineri, unde timpul este limitat. Utilizarea ligninei și a ejectorului de salivă permite uscarea rapidă și eficientă a zonei de tratament. Uscarea este esențială pentru a asigura aderența corectă a materialelor și pentru a evita complicațiile care ar putea apărea din cauza unei legături necorespunzătoare între material și dintele pacientului.





ETAPA 2 - PREGĂTIREA LEZIUNII CARIOASE



ARKONA



- Caria a fost îndepărtată cu grijă pentru a nu lăsa o sursă de infecție în dintele temporar. Datorită acestui lucru, dintele a fost pregătit pentru următoarea etapă a tratamentului. Având în vedere că dinții temporari sunt mai puțin mineralizați decât dinții permanenți, caria progresează mai rapid în aceștia, așa că este necesar să se verifice cu atenție dacă întreaga leziune carioasă a fost îndepărtată.





ETAPA 3 - PREGĂTIREA LUCRĂRII PENTRU CIMENTARE



ARKONA



- Dintele a fost demineralizat temeinic cu **ETCHGEL**. Această etapă este crucială pentru a crea porozitate microscopică, ceea ce mărește suprafața de aderență. Pe suprafața pregătită a fost aplicat **MASTERBOND**. Acesta asigură o legătură durabilă și puternică între compozit și țesutul dentar, datorită aderenței sistemului adeziv.





ARKONA



ETAPA 4 - APLICAREA FLOW-COLOR



- A fost aplicat FLOW-COLOR verde în cavitatea pregătită, care, datorită consistenței sale fluide, este ușor de aplicat și nu formează bule de aer care pot cauza hipersensibilitate și disconfort. Lucrul cu acest material este rapid și eficient, ceea ce este extrem de important pentru un pacient care nu cooperează întotdeauna pe deplin, iar datorită utilizării unui astfel de material, acesta are șansa de a obține o plombă etanșă și durabilă. Tânărul pacient a părăsit cabinetul mulțumit, având o plombă în culoarea lui preferată.





BENEFICIILE UTILIZĂRII FLOW-COLOR



ARKONA



- **Posibilitatea pacientului de a alege o culoare crește angajamentul și încrederea acestuia** - o cooperare mai bună în viitor
- **Ușurința în aplicare permite o plombare rapidă**
- **Timpul redus al vizitei**, ceea ce este esențial pentru pacienții tineri
- **Aderență bună** - durabilitatea plombei
- **Gamă largă de culori** - abordare individuală pentru fiecare caz





ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com