



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Punte pe bază **CHORDS** pe dinții 24-26



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEMELE GRAVE

ETCHGEL • MASTERBOND • CREATE



www.arkonadent.com



- Fotografia prezintă starea inițială.

- Stomatologia adezivă modernă oferă metode eficiente și minim invazive pentru completarea dinților lipsă, aspect deosebit de important pentru pacienții care nu acceptă proteze mobile. În astfel de cazuri, când utilizarea restaurărilor protetice mobile nu este recomandată din motive terapeutice, funcționale sau estetice, utilizarea materialelor adezive oferă o alternativă în domeniul reconstrucției protetice.
- În acest caz, pacientului care a dorit să completeze temporar spațiul cu dinți lipsă în timpul tratamentului protetic prin implant s-a realizat o punte adezivă utilizând **CHORDS** și compozitul **CREATE**.
- În final, alegerea terapiei bazate pe materiale adezive a permis completarea eficientă și estetică a dinților lipsă, menținând biocompatibilitatea maximă și interferența minimă cu țesuturile dure.





ETAPA 1 - CREAREA STRUCTURII PUNȚII



ARKONA



- Etapa cheie este pregătirea unui cadru de reconstrucție întărit. Fragmentele **CHORDS** sunt plasate pe suprafața modelului, fiind potrivite cu forma defectului și a structurii planificate a punții și a dinților adiacenți. Crearea unei astfel de punți nu necesită pregătirea țesuturilor sănătoase ale dinților pacientului, datorită căreia pacientul își păstrează dinții intacti.






ETAPA 1 - CREAREA STRUCTURII PUNȚII



ARKONA

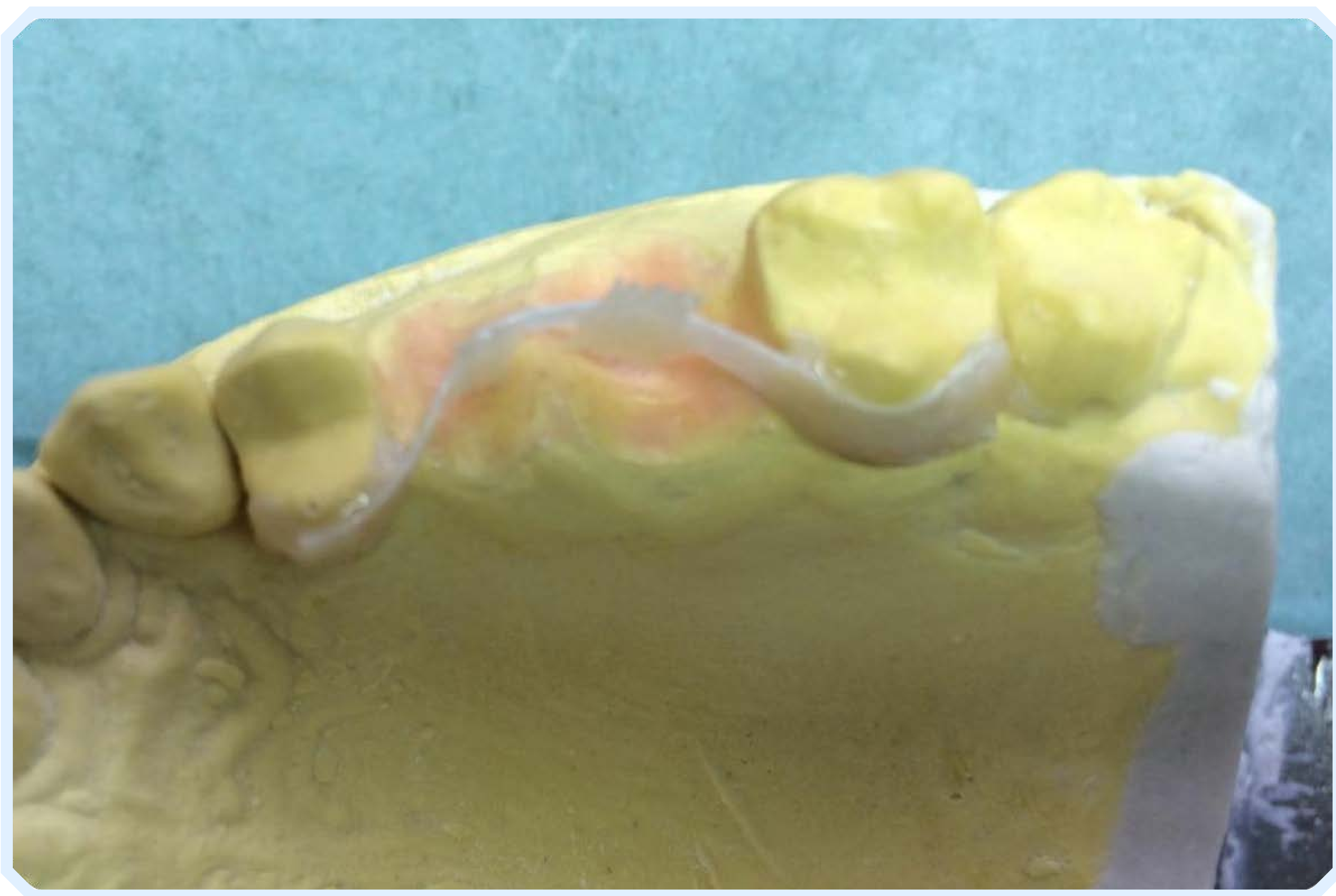

- **CHORDS**, datorită flexibilității și proprietăților mecanice excelente, permite modelarea convenabilă și precisă. Fibra de armare așezată furnizează un cadru pentru întreaga restaurare, sporind rezistența acesteia la încărcăturile ocluzale și contracarând deformările potențiale ale punții. Acest material este compatibil cu materialele compozite, ceea ce permite o conectare ușoară a acestora.





ARKONA



ETAPA 2 - CREAREA UNEI RESTAURĂRI DIN COMPOZIT CREATE



- După pregătirea scheletului, următoarea etapă este reconstrucția dinților lipsă utilizând compozitul **CREATE**, care, datorită plasticității sale, menținând în același timp stabilitatea, permite modelarea rapidă și precisă. Acest material imită perfect structura naturală a dinții, oferind transparența și estetica adecvate. Ușurința în modelare permite ajustarea continuă a formei și dimensiunilor dinților.





ETAPA 4 - POTRIVIREA ÎN OCLUZIE



ARKONA



- După modelare, dinții sunt polimerizați cu ajutorul luminii de la o lampă de polimerizare. Apoi, folosind hârtie de articulare, suprafața de masticăție este ajustată în funcție de dinții arcului opus. După ajustare, lucrarea este terminată și lustruită, ceea ce permite obținerea unei punți adezive gata în două vizite, oferind pacientului un efect funcțional și estetic rapid.





ETAPA 5 - FIXAREA PUNTEI



ARKONA



- Plasarea punții adezive temporare începe cu curățarea și demineralizarea dinților piloni cu **ETCHGEL**. Apoi, sistemul adeziv **MASTERBOND** este aplicat pe dinți și polimerizat, asigurând o legătură perfectă între material și dinte. Suprafețele interne ale punții sunt matificate și acoperite cu adeziv, iar materialul compozit este aplicat în zonele de contact, după care puntea este plasată în cavitatea bucală și apoi polimerizată.





ETAPA 6 - AJUSTAREA OCLUZIEI



ARKONA



- În final, ocluzia este verificată, excesul de material este îndepărtat și lustruit, asigurând stabilitatea și confortul pacientului. Aceasta este o soluție excelentă care oferă estetică și funcționalitate, fără a interfera permanent cu dinții piloni. Fixarea adezivă a permis plasarea stabilă a punții, astfel încât îndepărtarea ulterioară să fie minim invazivă.
- Lucrarea a îndeplinit cerințele estetice ale pacientului, eliminând necesitatea protezelor mobile, iar caracterul temporar al soluției a permis păstrarea dinților sănătoși și flexibilitatea tratamentului ulterior.





- **Completarea rapidă a dinților lipsă**
- **Satisfacerea nevoilor pacientului**
- recunoștință și satisfacție
- **Economisirea timpului în timpul procedurii** - profitul dumneavoastră
- **Flexibilitate și compatibilitate**
- un produs, multe aplicații
- **Estetică înaltă a lucrării cu minimă invazivitate**
- **Posibilitatea de a trata pacienții pe care i - am pierdut până acum din diverse motive**





ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com