



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Punte pe dinții 21-23, bazată pe **CHORDS**



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE

ETCHGEL • CREATE



www.arkonadent.com



- Fotografia prezintă starea inițială.

- Pacientul a raportat necesitatea înlocuirii dintelui 22 pierdut în urma unui traumatism, preferând o soluție minim invazivă din cauza posibilităților financiare limitate și a lipsei de timp pentru un tratament implantologic de durată. Alegerea unei punți adezive permite o reconstrucție estetică și funcțională fără necesitatea șlefuirii semnificative a dinților adiacenți.
- Soluția utilizând **CHORDS** și compozitul **CREATE** va oferi atât durabilitate, cât și estetică, cu un impact minim asupra bugetului pacientului. Aceasta reprezintă o alternativă deosebit de avantajoasă față de tratamentul protetic prin implanturi, permițând obținerea unui rezultat satisfăcător într-o singură vizită.





ETAPA 1 - PREGĂTIREA PENTRU PROCEDURĂ



ARKONA



- Dinții 21 și 23 au fost preparați pe suprafețele palatinale, doar în măsura necesară pentru a asigura aderența optimă a aripioarelor punții, cu scopul de a păstra cât mai mult din țesutul sănătos. Această abordare minimizează interferența cu structura naturală a dintelui, favorizând protecția pe termen lung a smalțului. O astfel de pregătire garantează stabilitatea și durabilitatea corespunzătoare a punții adezive.






ETAPA 2 - ISOLAREA ȘI PREGĂTIREA ZONEI DE LUCRU



ARKONA

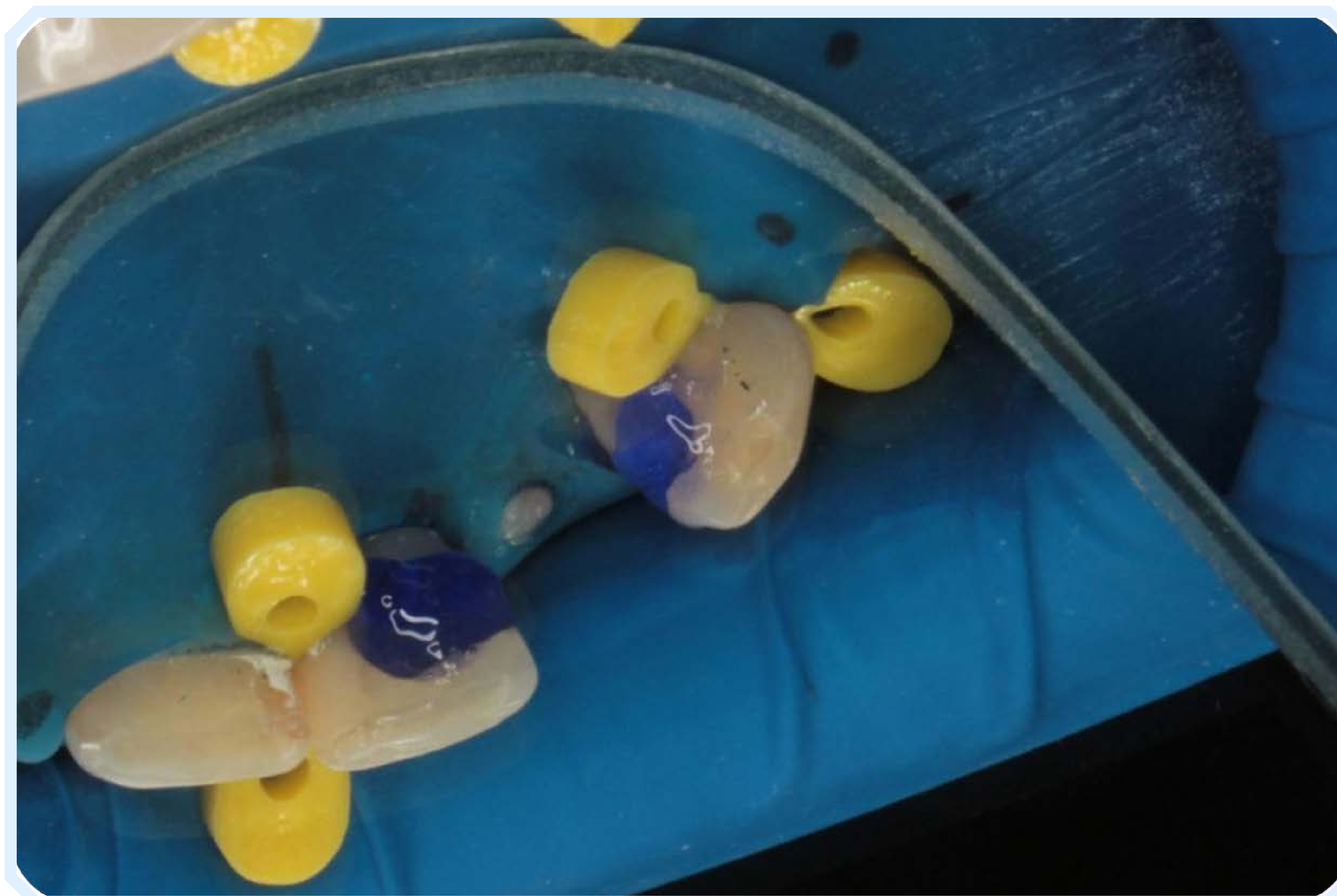

- Zona de tratament a fost izolată cu digă de cauciuc, iar datorită izolării, procedura a fost realizată în condiții controlate, reducând riscul de contaminare. Dinții au fost demineralizați cu **ETCHGEL**, ceea ce a permis crearea de microretenții în smalț, crescând rezistența legăturii adezive; de asemenea, a îmbunătățit penetrarea adezivului, aspect esențial pentru durabilitatea pe termen lung a punții.






ETAPA 3 - CREAREA CONSTRUCȚIEI PUNȚII



ARKONA

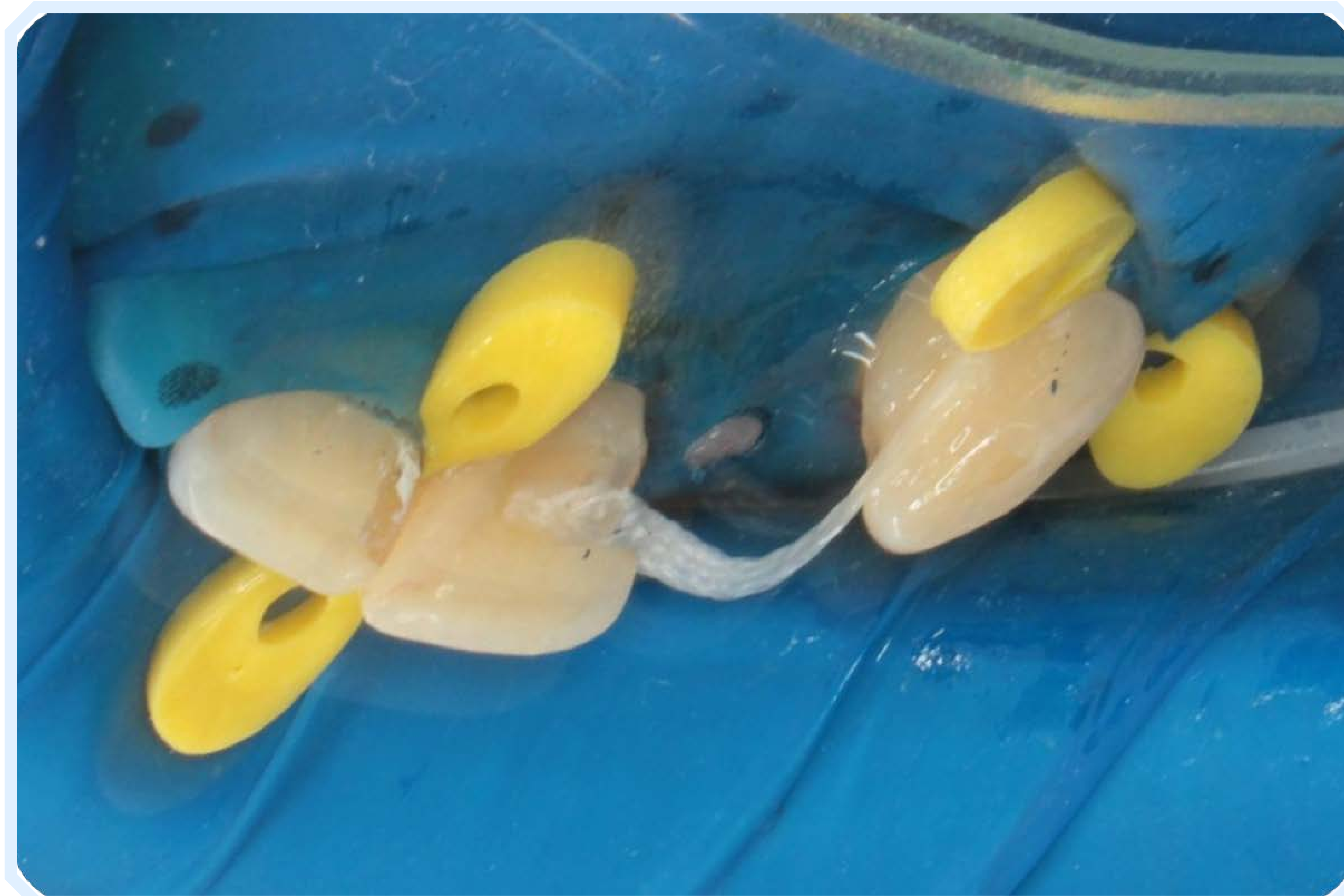

- **CHORDS** a fost tăiat cu precizie și adaptat la spațiul dintre dinții 21 și 23, creând un cadru pentru punte. Utilizarea acestuia întărește întreaga restaurare, făcând puntea rezistentă la încărcături mecanice. **CHORDS** se caracterizează printr-o rezistență ridicată și ușurință în aplicare, fiind o alegere ideală pentru acest tip de procedură. Pentru dentist, este un instrument care permite obținerea unor efecte rapide și previzibile, fără necesitatea unor servicii suplimentare din partea tehnicienilor dentari.





ARKONA



ETAPA 3.1 - CONSTRUIREA ȘABLONULUI PENTRU DINTELE PIERDUT



- **CHORDS** a fost modelat în forma arcului dintelui 22 pierdut, iar capetele sale au fost ancorate pe dinții 21 și 23 folosind compozitul **CREATE**. Această fixare a asigurat stabilitatea restaurării și a permis modelarea precisă a continuării restaurării. Datorită utilizării **CHORDS**, stabilizarea a fost durabilă, iar structura a fost pregătită pentru umplerea ulterioară.





ARKONA



ETAPA 3.2 - RECONSTRUCȚIA DINTELUI PIERDUT CU COMPOZITUL CREATE



- Umplerea spațiului după dintele 22 pierdut a fost realizată folosind compozitul **CREATE**. Acest material se remarcă prin estetică excelentă, potrivire ideală cu culoarea dinților naturali și rezistență ridicată la abraziune. Este ușor de aplicat și permite modelarea precisă a formei dintelui, datorită căreia umplutura se integrează armonios în arcul dentar al pacientului.





ETAPA 4 - POLIREA ȘI ADAPTAREA LA OCLUZIE



ARKONA



- Apoi s-a realizat ajustarea lucrării protetice în ocluzie, eliminând toate posibilele obstacole ocluzale. La final, puntea a fost lustruită cu grijă, ceea ce i-a conferit o suprafață netedă și va încetini acumularea plăcii bacteriene. Rezultatul final a fost atât funcțional, cât și estetic, sporind confortul pacientului.





EFFECTUL FINAL



ARKONA



- Utilizarea unei punți adezive a permis o umplere rapidă, eficientă și estetică a dintelui pierdut. Procedura a fost realizată în întregime într-o singură vizită, ceea ce a fost foarte convenabil pentru pacient. Această soluție nu a necesitat colaborarea cu un tehnician dentar, iar datorită materialelor de înaltă calitate de la Arkona, atât pacientul, cât și dentistul au obținut un rezultat satisfăcător.





BENEFICIILE UTILIZĂRII CHORDS ÎN LUCRĂRILE PROTETICE



ARKONA



- **Umplere rapidă a dinților pierduți**
- **Satisfacerea nevoilor pacientului**
- recunoștință și satisfacție
- **Economisirea timpului în timpul procedurii** - profitul tău
- **Flexibilitate și compatibilitate**
- un singur produs, multiple aplicații
- **Estetică înaltă a lucrării cu minimă invazivitate**
- **Posibilitatea de a trata pacienți pe care i - am pierdut până acum din diverse motive**





ARKONA

Od Stomatologa dla Stomatologów



www.arkonadent.com