



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Imobilizarea dinților mobili cu **COMCORD** pe dinții 32-42



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE

ETCHGEL



www.arkonadent.com



- Fotografia arată starea inițială.

- Un pacient purtând o proteză totală superioară s-a prezentat cu incisivi inferiori mobili și atrofie orizontală avansată a procesului alveolar mandibular. Într-un astfel de caz, soluția poate fi extracția dinților și realizarea unei proteze, însă pacientul a dorit stabilizarea dinților inferiori. El a dorit să își păstreze proprii dinți cât mai mult timp posibil și să evite metodele de tratament invazive.
- Pentru a răspunde așteptărilor pacientului, s-a decis utilizarea **COMCORD**, într-un mod minim invaziv, care asigură stabilizarea dinților și prelungește funcționalitatea acestora.
- Costul redus al procedurii și timpul scurt de execuție susțin utilizarea **COMCORD** în procedura de imobilizare a dinților.





ARKONA



ETAPA 1 – CURĂȚAREA ȘI ÎNLĂTURAREA DEPOZITELOR DENTARE



- A fost realizată o curățare amănunțită a depozitelor dentare. Îndepărtarea tartrului și a plăcii bacteriene este esențială pentru a asigura durabilitatea lucrării, deoarece elimină sursele potențiale de infecție și crește adeziunea materialelor compozite. Acest lucru va face procesul de stabilizare a dinților mai eficient și de lungă durată.





ETAPA 2 – PREGĂTIREA ȘI SEPARAREA DINȚILOR



ARKONA



- Dinții au fost poziționați corect cu ajutorul peneilor și separați cu o bandă de teflon. Această etapă este necesară pentru a asigura accesul adecvat la spațiile interdentare și pentru a permite aplicarea precisă a materialului. Separarea permite realizarea precisă a demineralizării și aplicarea sistemului adeziv, ceea ce crește stabilitatea și durabilitatea restaurării.





ETAPA 3 – DEMINERALIZARE ȘI APLICAREA SISTEMULUI ADEZIV



ARKONA



- Suprafețele dentare au fost demineralizate cu **ETCHGEL** și s-a aplicat sistemul adeziv, care a fost fotopolimerizat timp de 30 de secunde. Demineralizarea suprafețelor dentare este esențială pentru obținerea unei pătrunderi adecvate a sistemului adeziv. Aceasta asigură o aderență mai bună a materialului la suprafața dintelui, aspect crucial pentru durabilitatea restaurării. Procedura corectă reduce riscul apariției complicațiilor în cadrul lucrării, ceea ce se traduce prin ușurința în munca medicului și eficiența tratamentului.






ETAPA 4 – APLICAREA COMCORD



ARKONA

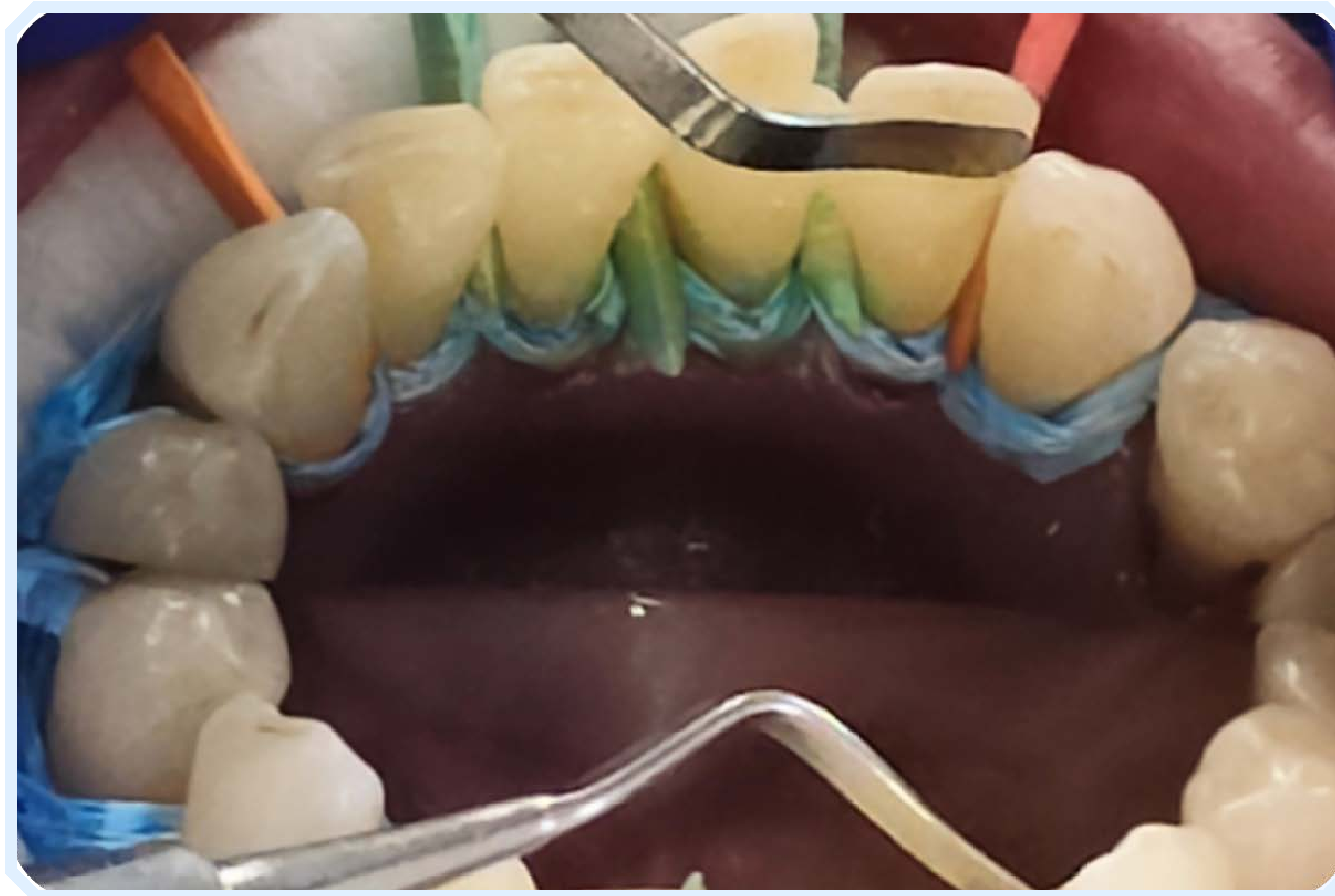

- Fragmentul corespunzător de **COMCORD** a fost măsurat și apoi plasat pe suprafețele linguale pregătite ale dinților anteriori. Procesul de aplicare a **COMCORD** este simplu și convenabil, permițând ajustarea rapidă și precisă la forma arcului dentar. Datorită flexibilității materialului, **COMCORD** poate fi modelat ușor, ceea ce îmbunătățește munca clinică și permite ajustarea individuală în funcție de nevoile fiecărui pacient.





ETAPA 5 – CREAREA SUPRAFETEI LINGUALE



ARKONA



- Au fost realizate corecții minore cu material compozit pentru a crea o suprafață linguală completă a arcului dentar. Modelarea precisă a compozitului asigură estetica și funcționalitatea dinților. Datorită acestora, s-a obținut o formă naturală și grosimea corespunzătoare a restaurării într-o singură vizită, oferind pacientului un sentiment de siguranță și confort în timpul mușcăturii.





ETAPA 6 – ÎNLĂTURAREA PROTECȚIEI ȘI LUSTRUIREA



ARKONA



- Protecția a fost îndepărtată și s-a efectuat lustruirea finală a lucrării. Procesul de lustruire este necesar deoarece face suprafața restaurării netedă și estetică. Finisarea finală asigură confortul pacientului și minimizează riscul acumulării plăcii bacteriene, ceea ce îmbunătățește prognoza restaurării prin amânarea necesității extracției dinților naturali.





EFECTELE „ÎNAINTE” ȘI „DUPĂ”



ARKONA



- Compararea stării dinților înainte și după procedură, care a relevat o fâșie de stabilizare frumos modelată, ce permite menținerea unei igiene orale perfecte. **COMCORD** s-a dovedit a fi un material excelent, oferind o durabilitate și estetică ridicate. Utilizarea acestui material a permis stabilizarea minim invazivă a dinților, ceea ce va prelungi semnificativ funcționalitatea acestora și confortul utilizării de către pacient. Pentru medic, lucrul cu **COMCORD** este deosebit de benefic datorită flexibilității sale, ușurinței în modelare și aplicării rapide, ceea ce scurtează timpul procedurii și crește eficiența tratamentului.





- **Procedură de stabilizare a dinților într**
- o singură vizită
- **Satisfacerea nevoilor pacientului** - recunoștință și satisfacție
- **Șansa de a păstra dinții care anterior erau considerați în pericol de pierdere**
- **Economisirea timpului procedurii**
- profitul dumneavoastră
- **Abordare minim invazivă, fără necesitatea pregătirii țesuturilor sănătoase ale dintelui**
- **Posibilitatea de a trata pacienți pe care i**
- am pierdut din diverse motive până acum





ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com