



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Stabilizarea arcadei dinților mobili parodontali
pe baza **CHORDS** și a compozitului **CREATE** pe dinții 32-42.



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE.

ETCHGEL • CREATE



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- Fotografia arată starea inițială.

- Pacientul a raportat o problemă cu dinții frontali mobili din arcadele inferioare. Din motive estetice și pentru menținerea funcției masticatorii, dorește să păstreze dinții naturali cât mai mult timp posibil. În mod deosebit, din cauza utilizării unei proteze complete în arcada superioară, care limitează confortul vieții. Din motive financiare, pacientul nu își permite o restaurare protetică permanentă, ceea ce îl determină să caute o soluție mai economică și în același timp eficientă.
- Utilizarea **CHORDS** este o soluție excelentă în acest caz, deoarece permite stabilizarea dinților fără a fi necesară extracția, minimizând invazivitatea și păstrând țesuturile naturale. În plus, procedura este rapidă, eficientă și oferă un rezultat estetic final.





ETAPA 1 - CURĂȚAREA CÂMPULUI DE TRATAMENT



ARKONA



- Dinții pacientului au fost curățați temeinic de depunerile dentare, ceea ce a fost esențial pentru a obține o suprafață curată și uscată, necesară pentru o adeziune corespunzătoare a materialelor dentare. Eliminarea tartrului dentar și a plăcii bacteriene previne complicațiile potențiale, cum ar fi infecțiile bacteriene, dezvoltarea bolii parodontale sau detașarea materialului pe viitor.





ETAPA 2 - PREGĂTIREA DINȚILOR



ARKONA



- Plombele vechi din compozit, care nu erau suficient de durabile și nu ofereau o stabilizare adecvată, au fost îndepărtate de pe dinți. Aceasta a fost necesară pentru a evita slăbirea aderenței noilor materiale din cauza contaminării și a plombei de compozit îmbătrânite. Această etapă a permis, de asemenea, obținerea unei suprafețe uniforme pentru aplicarea **CHORDS**.





ETAPA 3 - SEPARARE, STABILIZARE ȘI DEMINERALIZARE



ARKONA



- Dinții au fost fixați cu cofraje, care le-au asigurat stabilitatea și au permis obținerea unor spații corespunzătoare între rădăcinile expuse. Aceste spații erau necesare pentru distribuirea uniformă a materialelor adezive, pentru o stabilizare pe termen lung a dinților. Apoi, a fost aplicat **ETCHGEL** pe suprafețele dentare, pregătind țesuturile pentru o legătură permanentă cu materialul compozit.





ETAPA 4 - APLICAREA CHORDS



ARKONA



- **CHORDS** a fost tăiat la lungimea corespunzătoare și aplicat pe suprafața vestibulară a dinților anteriori inferiori, care fuseseră anterior acoperiți cu un sistem adeziv. Materialul a fost legat permanent de dinți datorită proprietăților sale adezive, oferind o stabilizare excelentă. **CHORDS** se remarcă prin flexibilitatea sa, ceea ce facilitează modelarea și nu este vizibil sub structura compozită, făcându-l o alegere ideală pentru stabilizarea minim invazivă a dinților.





ETAPA 5 - SUPERSTRUCTURA COMPOZITĂ



ARKONA



- Cu ajutorul compozitului **CREATE**, au fost reconstruite suprafețele vestibulare ale dinților, întărind structura îmbinată fără a fi necesară pregătirea țesuturilor proprii ale pacientului. Datorită acestei tehnici, dinții au fost protejați eficient, menținându-se anatomia lor naturală. Procedura a fost realizată într-o singură vizită, ceea ce a crescut semnificativ confortul pacientului și a redus timpul de tratament.





PASUL 6 - AJUSTAREA OCLUZIEI LUCRĂRII



ARKONA



- Dinții fixați au fost ajustați cu grijă în ocluzie pentru a elimina suprasolicitățile care ar putea duce la o instabilitate suplimentară. Acest lucru a permis pacientului să mestece confortabil și să prevină noi daune. Ajustarea corectă în ocluzie este esențială pentru succesul pe termen lung al procedurii.





BENEFICIILE UTILIZĂRII **CHORDS**



ARKONA



- **Procedură de stabilizare a dintelui într-o singură vizită**
- **Satisfacerea nevoilor pacientului – recunoștință și satisfacție**
- **Șansa de a păstra dinți care anterior erau considerați a fi în risc de pierdere**
- **Economisirea timpului de procedură – profitul tău**
- **Abordare minim invazivă, fără a fi necesară pregătirea țesuturilor dentare sănătoase**
- **Posibilitatea de a trata pacienți pe care i-am pierdut până acum din diverse motive**





ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com