



De la Stomatologi pentru Stomatologi



ARKONA

Punte pe dinții 13-22, bazată pe **COMCORD**



SOLUȚII RAPIDE ȘI DOVEDITE PENTRU PROBLEME GRAVE

ETCHGEL • MASTERBOND • GLAZE • CREATE



www.arkonadent.com



DESCRIEREA CAZULUI



ARKONA



- Fotografia prezintă starea inițială.

- Dinții pierduți în partea estetică a maxilarului reprezintă o problemă semnificativă pentru pacienții. Neatenția la igienă și leziunile provoacă pierderea dinților, ceea ce duce la complexe serioase și lipsa dorinței de a zâmbi în persoanele afectate de această problemă.
- Obstacolele în recăpătarea zâmbetului anterior sunt adesea fricile, finanțele și timpul. În astfel de situații, este util să găsim o soluție care să fie adaptată posibilităților și nevoilor pacientului.
- În cazul acestui pacient, s-a propus utilizarea **COMCORD** pentru a crea o restaurare adezivă combinată.
- Pacientul va putea să se bucure de un zâmbet strălucitor după doar o singură vizită!





ETAPA 1 - PREGĂTIREA



ARKONA



- Înainte de a începe lucrarea, este necesar să se pregătească țesuturile carioase și apoi să se demineralizeze aceste suprafețe temeinic. **ETCHGEL** demineralizează smalțul timp de 30 de secunde și dentina timp de 10 secunde. Clătiți temeinic, uscați și acoperiți cu sistemul adeziv **MASTERBOND** pentru a crea aderența **COMCORD** cu țesuturile dentare. O astfel de pregătire a zonei de lucru ne va oferi confort în timpul procedurii și va prelungi semnificativ durabilitatea restaurării adezive.






ETAPA 2 - CONSTRUCȚIA ARCULUI ADEZIV ȘI RECONSTRUCȚIA DINTELOR PIERDUTE



ARKONA

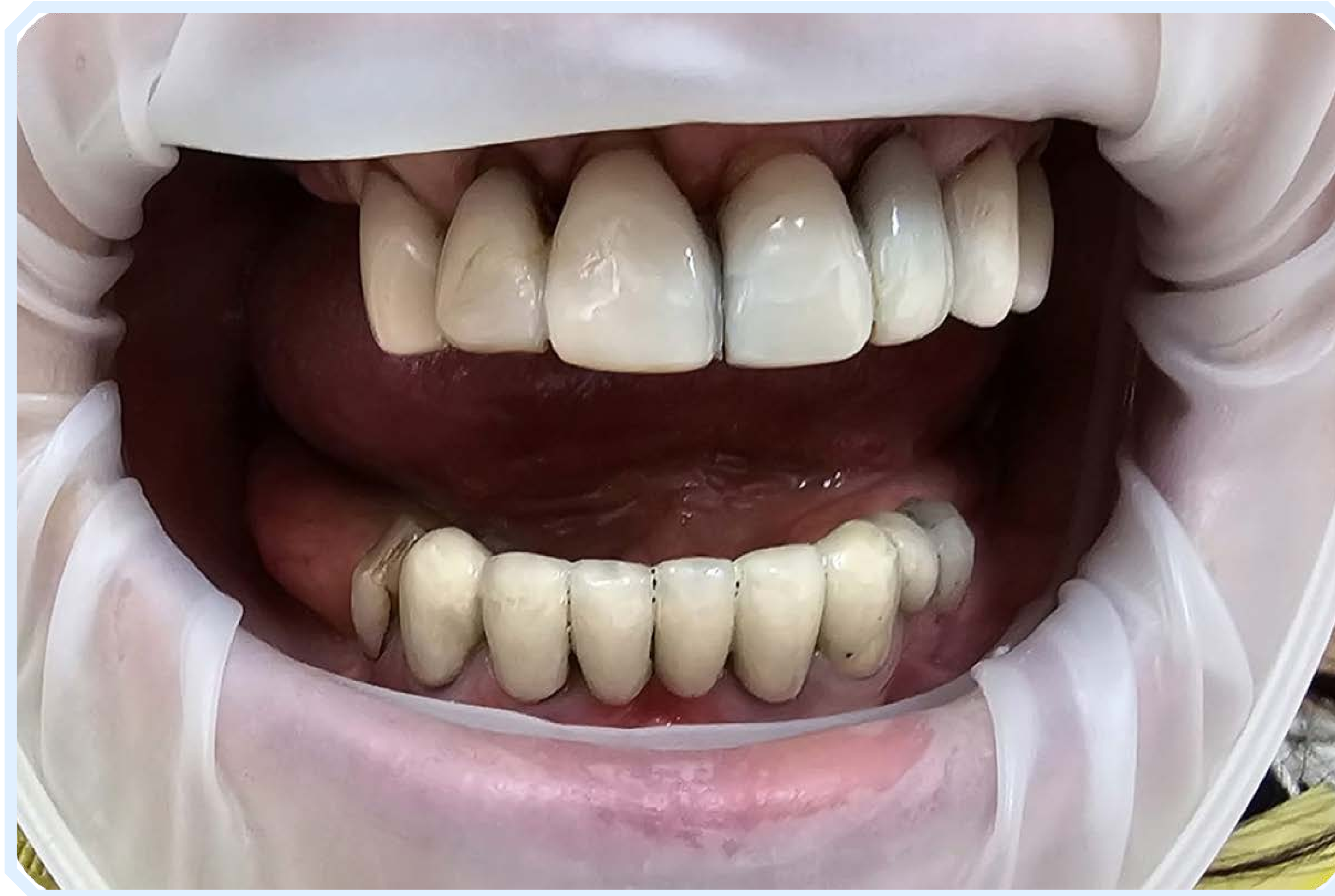

- După pregătirea corespunzătoare a zonelor pregătite în arc folosind **COMCORD**, realizăm o bază de dinți frontali în formă de inel.
- După polimerizarea acesteia, reconstruim părțile lipsă ale dinților folosind compozitul **CREATE**.
- Dinții întăriți în acest fel sunt rezistenți la forțe mult mai puternice decât forțele de mestecare.





ETAPA 3 - FINISARE ESTETICĂ



ARKONA



- După calcinarea și ajustarea dinților în ocluzie, este momentul să oferim lucrării un luciu. Realizăm acest pas folosind **GLAZE**. Utilizarea acestuia economisește mult timp în lustruirea mecanică a lucrării și, datorită luciului, reîmprospătează vizual zâmbetul.
- Efectul final al lucrării estetice și durabile întărite cu **COMCORD**.





BENEFICIILE UTILIZĂRII COMCORD



ARKONA



- **Umplerea dinților pierduți într** - o singură vizită
- **Satisfacerea nevoilor pacientului** - recunoștință și satisfacție
- **Ușurința de a face corecții** - estetică și funcționalitate bună a dintelui pentru mulți ani
- **Economisirea timpului procedurii** - profitul tău
- **Posibilitatea de a umple dinți pierduți într** - un mod non-invaziv
- **Posibilitatea de a trata pacienți pe care i** - am pierdut până acum din diverse motive





ARKONA

De la Stomatologi pentru Stomatologi



www.arkonadent.com