



Marquage des orifices canalaire avec le composite dentaire **FLOW-COLOR**



DES SOLUTIONS RAPIDES ET ÉPROUVÉES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX CLINIQUES LES PLUS EXIGEANTS





DESCRIPTION DU CAS



ARKONA



- Les patients rencontrent souvent des problèmes dentaires plus graves, comme des caries étendues. Elles nécessitent souvent une intervention endodontique non planifiée. Il nous faut alors préparer correctement les dents concernées en vue du futur traitement endodontique et les protéger jusqu'à la prochaine visite du patient.





- Nous préparons soigneusement la dent en éliminant tous les tissus cariés. Il arrive que la carie ait atteint la pulpe, ce qui nous oblige à traiter également les tissus mous infectés. Ce type de situation est fréquent lors des consultations courtes, où le temps manque pour une préparation et une obturation canalaire complètes. Il est alors essentiel de repérer et de protéger les orifices canaux, afin de faciliter et d'accélérer l'intervention lors de la visite suivante.



ÉTAPE 2



ARKONA



- Pour ce type de procédure, un composite fluide coloré est l'outil idéal à avoir toujours à portée de main. Il facilite le diagnostic lors des traitements ultérieurs et permet une meilleure traçabilité clinique. La large palette de teintes disponibles optimise l'organisation du travail, en attribuant une couleur spécifique à chaque indication. L'essentiel : que son utilisation reste simple, rapide et parfaitement fonctionnelle au fauteuil.





- Après avoir appliqué FLOW-COLOR, lors de la réouverture de la dent, la reprise du traitement sera nettement plus rapide et notre travail plus efficient. FLOW-COLOR peut également servir de couche de différenciation sous une restauration temporaire, après un traitement endodontique. Cette étape rapide protégera les dents de vos patients d'une préparation excessive par la suite, vous ferez ainsi gagner du temps à votre patient sur le fauteuil et gagnerez sa gratitude et sa confiance.



POURQUOI CHOISIR FLOW-COLOR ?



ARKONA



- Vous économisez du temps pour vous-même et votre patient
- Vous vous facilitez la tâche à moindres frais
- Vous organisez mieux vos procédures
- Patient satisfait = patient fidélisé (votre meilleure récompense !)



www.arkonadent.com



ARKONA

Créé par des Dentistes pour des Dentistes



www.arkonadent.com