




SCELLEMENT PROPHYLACTIQUE DE LA DENT 17 AVEC SEALPRIM ET ETCHGEL patiente, 18 ans



DES SOLUTIONS RAPIDES ET ÉPROUVÉES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX CLINIQUES LES PLUS EXIGEANTS



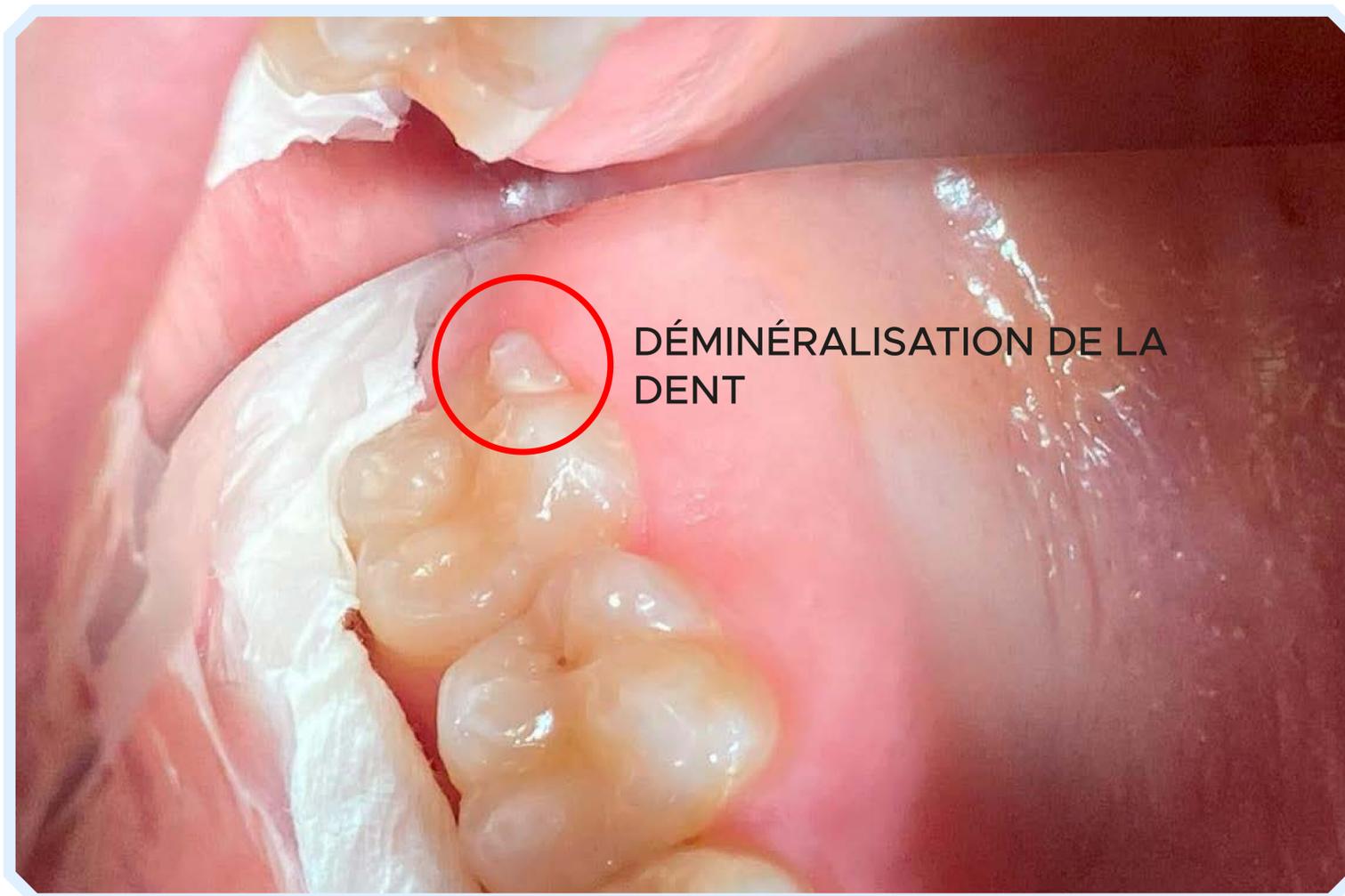

- Un phénomène fréquemment observé, notamment chez nos jeunes patients, est l'apparition de déminéralisations dentaires, révèlent un stade initial de carie.
- Elles apparaissent typiquement dans les zones d'accès difficile : sillons et puits occlusaux des molaires et prémolaires. C'est le cas de notre patiente de 18 ans.



- Sur les puits et sillons nettoyés et séchés, nous appliquons **ETCHGEL** qui prépare la surface de l'émail dentaire à l'application de **SEALPRIM**.
- Grâce à la consistance gélifiée de ce dispositif dentaire, nous sommes capables de répartir précisément la matière, sans provoquer une déminéralisation excessive de l'émail dentaire adjacent.
- La surface d'émail dentaire ainsi gravée prend une coloration blanchâtre crayeuse, ce qui facilite l'application précise du sealant sur la surface d'une dent. Sa consistance liquide nous permet un travail aisé et l'applicateur à usage unique garantit la sécurité de nos patients tout en améliorant la qualité des soins fournis.



- Après la polymérisation du matériau dentaire, une dent est protégée contre la carie. L'ensemble de la procédure ne prend que 15 minutes ! Le scellement dentaire gagne du temps et simplifie le travail. Nous épargnons au patient le stress et la douleur, ce qui nous permet de gagner sa confiance ainsi que la reconnaissance des parents pour la protection des dents de leurs enfants.

➔ POURQUOI CHOISIR LE SCHELLEMENT DENTAIRE ?



ARKONA



- Procédure rapide et facile
- Technique non invasive et économique
- Moins de stress face à l'inconfort du patient
- Patient satisfait = patient fidélisé (votre meilleure récompense !)



ARKONA

Créé par des Dentistes pour des Dentistes



www.arkonadent.com