



Réalisation du bridge à la base de **CHORDS** sur les dents 21 à 23



DES SOLUTIONS RAPIDES ET ÉPROUVÉES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX CLINIQUES LES PLUS EXIGEANTS

Pendant le traitement on a utilisé :

ETCHGEL • CREATE





- La photo montre l'état initial.

- Le patient s'est présenté au cabinet dentaire avec un édentement de la dent 22 suite à un traumatisme, préférant une solution minimalement invasive en raison de moyens financiers limités et du manque de temps pour un traitement implantaire plus long. Le choix d'un bridge adhésif permet une restauration esthétique et fonctionnelle sans avoir à tailler de façon significative les dents adjacentes.
- La solution utilisant **CHORDS** et le composite dentaire **CREATE** garantit à la fois durabilité et esthétique, tout en restant économique pour le patient. C'est une alternative particulièrement avantageuse par rapport à l'implantologie, offrant un résultat satisfaisant en une seule visite.





ARKONA



ÉTAPE 1 – PRÉPARATION À L'INTERVENTION ET AU FAÇONNAGE



- Les dents 21 et 23 ont été préparées uniquement du côté palatin, de façon minimale, pour permettre l'adhésion optimale des ailettes du bridge, préservant ainsi un maximum de tissus sains. Cette approche limite l'atteinte à la structure naturelle des dents, favorisant la protection à long terme de l'émail dentaire. Cette préparation garantit également une bonne stabilité et durabilité du bridge adhésif.






ARKONA



ÉTAPE 2 – ISOLATION ET PRÉPARATION DU CHAMP OPÉRATOIRE

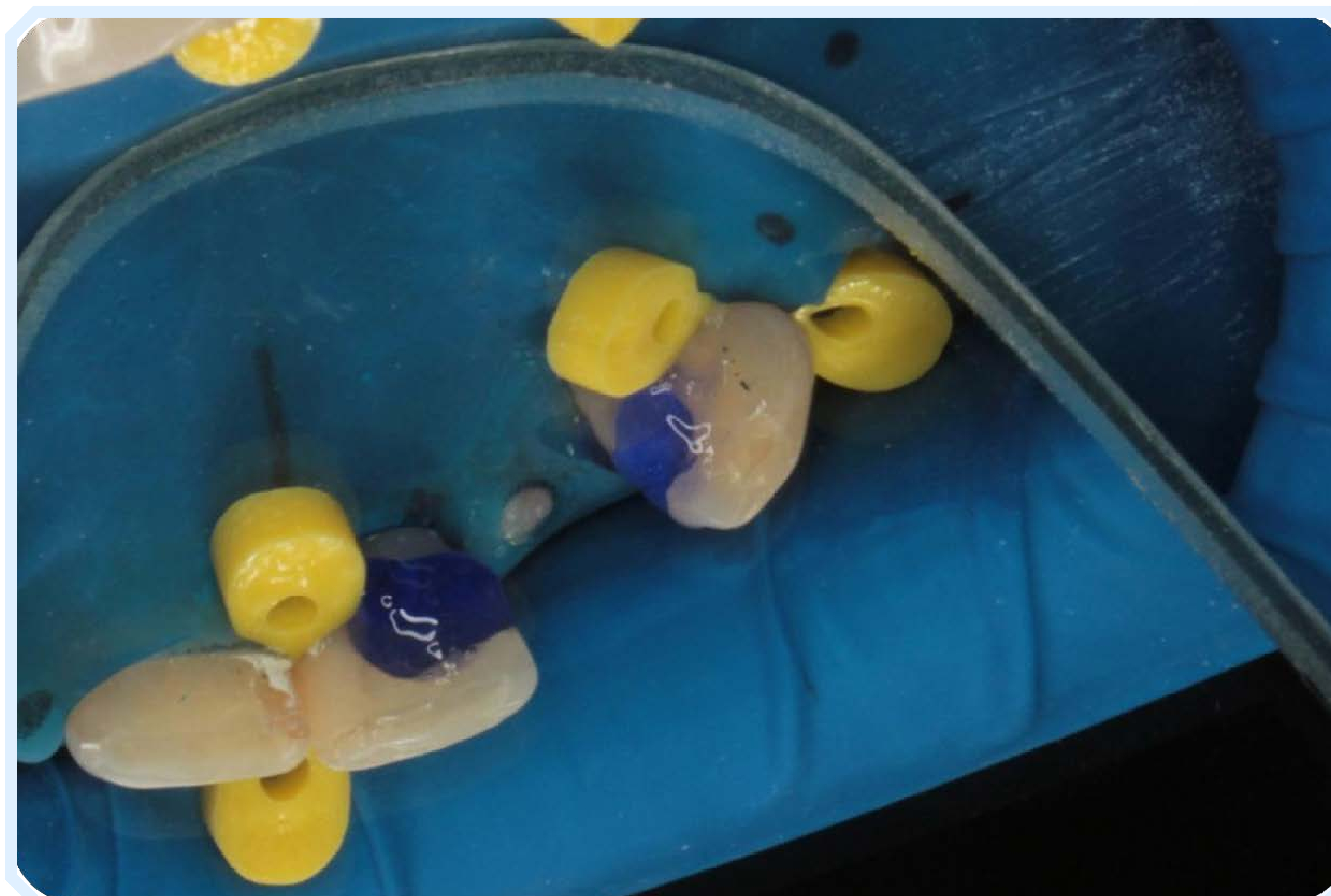

- Le champ opératoire a été isolé à l'aide d'une digue dentaire, ce qui a permis de travailler dans des conditions contrôlées et de réduire les risques de contamination. Les dents ont été mordancées à l'aide d'**ETCHGEL**, rendant possible une micro-rétention dans l'émail dentaire et renforçant ainsi la liaison adhésive. Cela favorise aussi la pénétration de l'adhésif - étape indispensable pour la durabilité à long terme du bridge.






ÉTAPE 3 – RÉALISATION DE L'ARMATURE DU BRIDGE



ARKONA

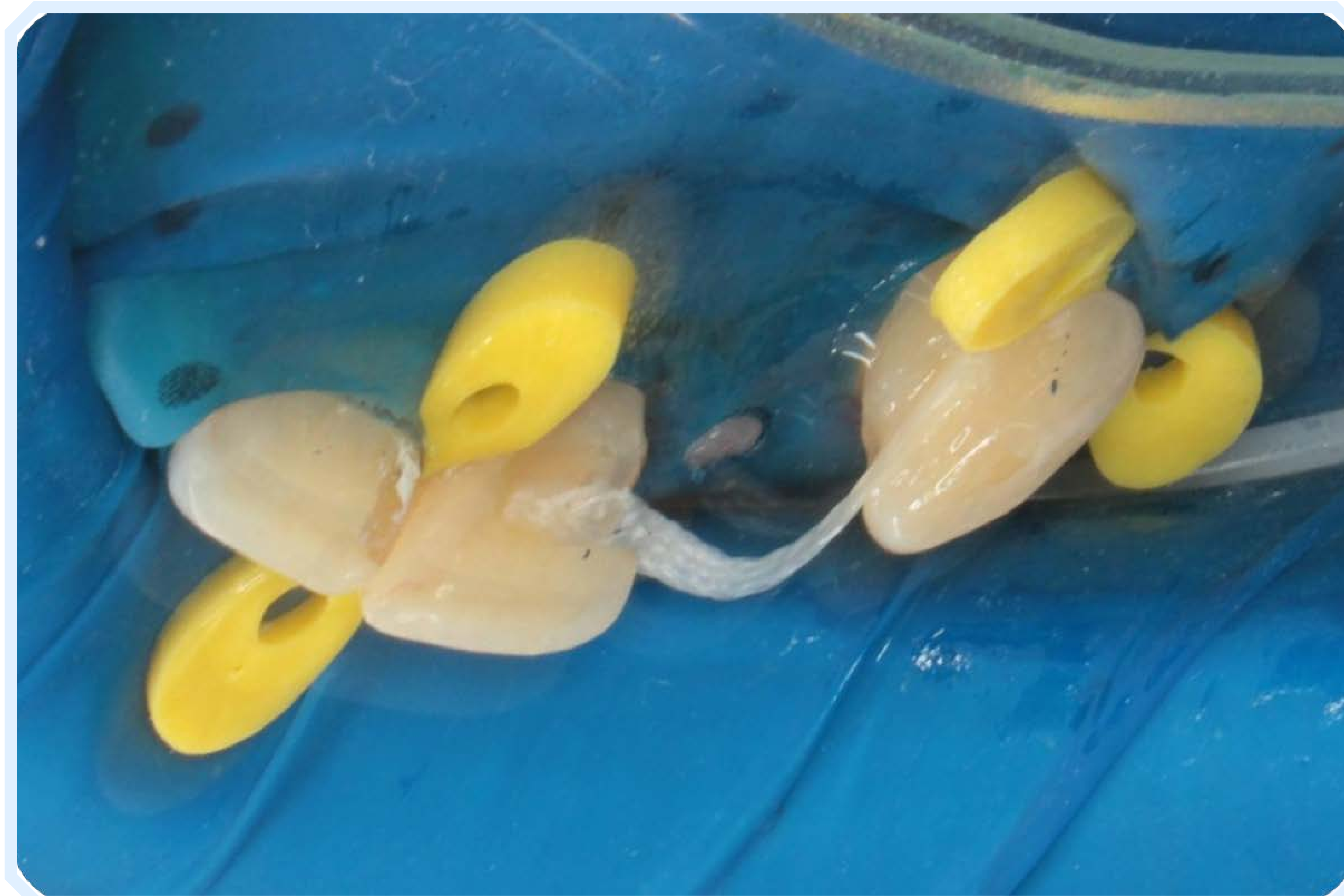

- **CHORDS** a été découpé et adapté avec précision à l'espace inter-dentaire entre les dents 21 et 23, formant ainsi l'armature du bridge. Son utilisation renforce l'ensemble de la reconstruction, rendant le bridge plus résistant aux contraintes mécaniques. **CHORDS** se distingue par sa grande résistance et sa facilité d'application, en faisant une solution idéale pour ce type de procédure. Pour le praticien, c'est une option rapide et prévisible, sans recours au prothésiste.





ARKONA



ÉTAPE 3.1 – CRÉATION DU MODÈLE DE LA DENT MANQUANTE



- **CHORDS** a été formé en arc, selon la forme de la dent 22 manquante, et ses extrémités ont été ancrées sur les dents 21 et 23 avec du composite dentaire **CREATE**. Ce scellement a assuré la stabilité de la restauration et a permis un modelage précis de la suite. Grâce à l'utilisation de **CHORDS**, la stabilisation est durable et la structure prête à être complétée.





ÉTAPE 3.2 – RESTAURATION DE L'ÉDENTEMENT AVEC LE COMPOSITE DENTAIRE CREATE



ARKONA



- Le comblement de l'espace de la dent 22 manquante a été réalisé à l'aide du composite dentaire **CREATE**. Ce matériau dentaire se distingue par son excellente esthétique, sa parfaite adaptation à la teinte des dents naturelles et sa haute résistance à l'usure. Il est facile à manipuler et permet de sculpter la forme de la dent avec précision, ce qui garantit une intégration harmonieuse à l'arcade dentaire du patient.





ÉTAPE 4 – POLISSAGE ET AJUSTEMENT OCCLUSAL



ARKONA



- Nous avons ensuite ajusté la restauration sur le plan occlusal, éliminant toute interférence possible lors de la fermeture de la bouche. Enfin, le bridge a été soigneusement poli, ce qui assure une surface lisse à la restauration et ralentit la formation de la plaque dentaire. Le résultat final est à la fois fonctionnel et esthétique, augmentant ainsi le confort du patient.





RÉSULTAT FINAL



ARKONA



- L'utilisation d'un bridge adhésif a permis de restaurer rapidement, efficacement et esthétiquement la dent manquante. Toute la procédure a été réalisée lors d'une seule visite, ce qui était très commode pour le patient.
- Cette solution n'a pas nécessité l'intervention d'un prothésiste, et grâce à la qualité des matériaux dentaires Arkona, le patient comme le praticien ont pu obtenir un résultat pleinement satisfaisant.





- **Remplacement express d'une dent manquante**
- **Réponse aux besoins du patient** : gratitude et satisfaction
- **Gain de temps** : votre bénéfice
- **Flexibilité et compatibilité** : un seul dispositif dentaire, de multiples utilisations
- **Haute esthétique pour une intervention peu invasive**
- **Possibilité de soigner des patients auxquels on ne proposait jusqu'alors aucune solution**





ARKONA

Créé par des Dentistes pour des Dentistes



www.arkonadent.com