

Créé par des Dentistes pour des Dentistes



ARKONA

# Réalisation du bridge à la base de COMCORD sur les dents 13 à 22



DES SOLUTIONS RAPIDES ET ÉPROUVÉES  
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX CLINIQUES LES PLUS EXIGEANTS

Pendant le traitement on a utilisé :

ETCHGEL • BOND • GLAZE • CREATE



[www.arkonadent.com](http://www.arkonadent.com)



- La photo montre l'état initial.

- Les absences dentaires dans la zone esthétique du maxillaire représentent un problème important parmi les patients en odontologie. Un manque d'hygiène bucco-dentaire ainsi que des traumatismes provoquent la perte de dents, ce qui entraîne d'importants complexes et un manque d'envie de sourire chez les personnes concernées.
- Les obstacles au retour d'un sourire radieux sont souvent la peur, les finances et le temps. Dans de telles situations, il est utile de trouver une solution adaptée aux possibilités et aux besoins du patient.
- Dans le cas de ce patient, il a été proposé d'utiliser COMCORD pour réaliser une reconstruction adhésive combinée.
- Le patient pourra profiter d'un sourire éclatant en une seule visite !



ARKONA

➔ LA PHOTO MONTRE L'ÉTAT INITIAL.



- Avant de commencer la procédure, il faut traiter les tissus cariés, puis graver soigneusement ces surfaces. Nous gravons l'émail dentaire avec **ETCHGEL** pendant 30 secondes et la dentine seulement 10 secondes. Nous rinçons soigneusement, séchons, puis recouvrons avec le système adhésif **BOND** pour établir l'adhésion de **COMCORD** aux tissus dentaires. Une telle préparation du champ opératoire assure un confort de travail et prolonge considérablement la durée de vie de la reconstruction adhésive.



- Après la préparation correcte des zones traitées dans l'arcade à l'aide de COMCORD, nous réalisons la sous-structure des dents antérieures en forme d'anneau.
- Après sa polymérisation, nous reconstruisons les parties manquantes des dents à l'aide du composite dentaire CREATE.
- Les dents ainsi renforcées sont résistantes à des forces bien supérieures aux forces de mastication.



- Après avoir vérifié et ajusté l'occlusion des dents, il est temps de donner de la brillance à la restauration. Cette étape se réalise à l'aide de **GLAZE**. Son utilisation permet d'économiser beaucoup de temps de polissage mécanique et son éclat rajeunit visuellement le sourire.
- Résultat final de la restauration renforcée par **COMCORD**.



- **Remplacement dentaire en une seule visite**
- **Satisfaction des besoins du patient** : gratitude et satisfaction
- **Corrections faciles à effectuer** : bonne esthétique et fonctionnalité des dents à long terme
- **Gain de temps** : votre bénéfice
- **Possibilité non invasive de compenser un manque dentaire**
- **Possibilité de traiter des patients jusqu'ici perdus pour diverses raisons**



# ARKONA

**Créé par des Dentistes pour des Dentistes**



[www.arkonadent.com](http://www.arkonadent.com)