

◆ Créé par des Dentistes pour des Dentistes ◆



ARKONA

Réalisation de l'attelle de stabilisation de l'arcade dentaire inférieure à la base de COMCORD sur les dents 33 à 43

➤ DES SOLUTIONS RAPIDES ET ÉPROUVÉES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX CLINIQUES LES PLUS EXIGEANTS

Pendant le traitement on a utilisé :

ETCHGEL



www.arkonadent.com



- Les problèmes auxquels sont confrontés les patients atteints de parodontite sont la résorption de l'os de l'alvéole dentaire, entraînant une rétraction de la gencive et l'apparition de dents mobiles et instables. Une telle situation nécessite une intervention urgente d'un spécialiste afin d'immobiliser et de sécuriser les dents.
- Une solution éprouvée dans ce cas est l'utilisation de fibres composites COMCORD pour la contention des dents mobiles.
- Le problème est ainsi résolu de manière très esthétique, offrant au patient un sentiment de sécurité et de confiance en soi.



ARKONA

➔ ÉTAPE 1 - PRÉPARATION À LA PROCÉDURE



- Avant de commencer la procédure, nous mesurons et découpons un fragment de COMCORD légèrement plus long que la section de l'arcade dentaire à traiter. Les dents qui seront reliées par l'attelle composite sont gravées à l'aide d'ETCHGEL. Nous procédons ensuite à un séchage minutieux.



ARKONA

➔ ÉTAPE 2 - STABILISATION DES DENTS DANS L'ARCADE DENTAIRE



- Avant d'appliquer le système d'adhésion, les dents doivent être stabilisées à l'aide de coins. Cela permet une application précise et confortable de COMCORD et empêche le matériau composite de pénétrer dans des zones difficiles à nettoyer.



ARKONA

➔ ÉTAPE 3 - APPLICATION DE LA FIBRE COMPOSITE



- Après une préparation appropriée des dents, le fragment mesuré de COMCORD est placé progressivement sur les dents de l'arcade dentaire inférieure. Le fragment est également inséré dans les espaces interdentaires et chaque dent doit être protégée par la fibre composite sur trois faces. Ensuite, nous procédons au modelage pour que COMCORD adhère parfaitement à la dent et assure une surface lisse.

➔ ÉTAPE 4 - AJUSTEMENT DE L'OCCLUSION



ARKONA



- Pour que l'attelle dentaire remplisse correctement sa fonction, il convient d'ajuster l'occlusion à l'aide du papier d'occlusion, en veillant à des contacts réguliers. Avec une bonne hygiène bucco-dentaire, la mobilité des dents n'évoluera pas et les dents resteront stables et protégées pendant de nombreuses années !



- **Stabilisation dentaire non invasive en une seule visite**
- **Satisfaction des besoins du patient** : gratitude et satisfaction
- **Corrections faciles à effectuer** : bonne esthétique et fonctionnalité des dents à long terme
- **Gain de temps** : votre bénéfice
- **Possibilité non invasive de compenser un manque dentaire**
- **Possibilité de traiter des patients jusqu'ici perdus pour diverses raisons**



ARKONA

Créé par des Dentistes pour des Dentistes



www.arkonadent.com