



PERIO-FLUSH

**Soins quotidiens
dans la lutte contre les
maladies parodontales**

PERIO-FLUSH est une solution professionnelle **pour l'irrigation des poches parodontales**, conçue pour le travail quotidien en cabinet. Elle nettoie efficacement les poches, réduit la charge des bactéries anaérobies et aide à limiter le saignement ainsi que l'inflammation, **créant de meilleures conditions pour la régénération des tissus parodontaux**. Grâce à l'association d'une formule douce et isotonique avec une application précise à l'aide d'une seringue, **elle assure un contrôle total** du geste et permet un **nettoyage efficace** même des zones les plus exigeantes et difficiles d'accès.

Pourquoi PERIO-FLUSH?

Sans effet moussant



Il ne mousse pas pendant l'application, ce qui améliore le confort du patient et permet au praticien de conserver une visibilité totale et un contrôle complet de l'intervention.

Sans chlorhexidine



Formule à base de bromure de domifène, sans ajout de chlorhexidine, ce qui rend la préparation douce pour les tissus et bien tolérée, même en cas d'inflammation.

Sans antibiotiques



Il ne contient pas d'antibiotiques, éliminant ainsi les risques liés à leur usage excessif et au développement de résistances bactériennes.

**Destiné à un usage
en cabinet**



Idéal pour les procédures quotidiennes en cabinet – il agit rapidement, généralement en 2-3 minutes, et peut être facilement associé à de nombreux actes standards d'hygiène et de parodontologie.

Efficacité clinique confirmée*

98%

PERIO-FLUSH a efficacement éliminé les dépôts dans 98 % des poches irriguées.

1,3 mm

En moyenne, dans le groupe des poches étudiées, la diminution de la profondeur des poches après le traitement par **PERIO-FLUSH** a été de 1,3 mm.

79%

Dans 80,4 % des poches examinées, l'irrigation avec **PERIO-FLUSH** a permis de réduire la charge des bactéries anaérobies, en moyenne de 79 %.



Le rinçage de la poche avec **PERIO-FLUSH** a eu un effet statistiquement significatif sur la réduction du saignement.

*Étude clinique: UR.DNB.4501.0001.2018



AVANT




APRÈS

Indications


- **Après le détartrage et l'élimination du tartre** – rinçage des dépôts résiduels et du contenu inflammatoire
- **Éruption dentaire difficile (par ex. dent de sagesse)** – nettoyage des poches douloureuses et difficiles d'accès
- **Dans les espaces interdentaires** – là où les points de contact corrects sont absents
- **Zones des appareils orthodontiques** – amélioration de l'hygiène autour des brackets et des arcs
- **Avant une extraction** – nettoyage du champ opératoire et réduction du risque de complications
- **Zones des couronnes, bridges et crochets de prothèses** – contrôle régulier des inflammations dans les zones difficiles d'accès

Exemples d'utilisation


- ◆ Irrigation des poches parodontales après le détartrage

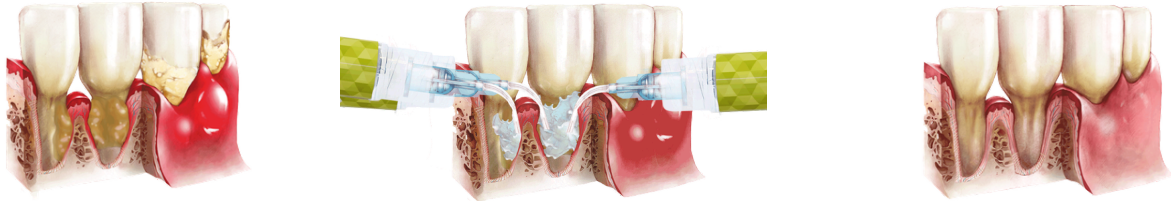

- ◆ Zones des restaurations de classe II en l'absence de points de contact corrects

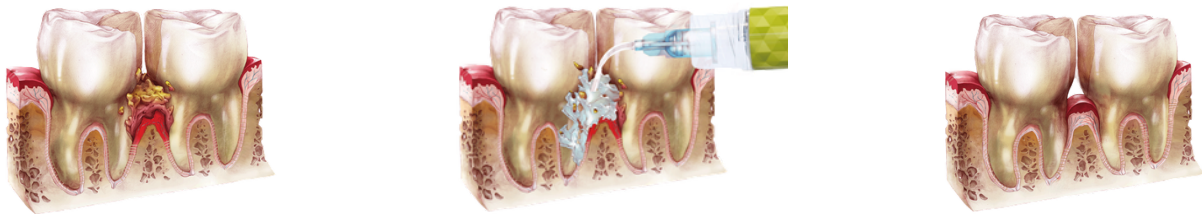

- ◆ Zones autour des appareils orthodontiques fixes

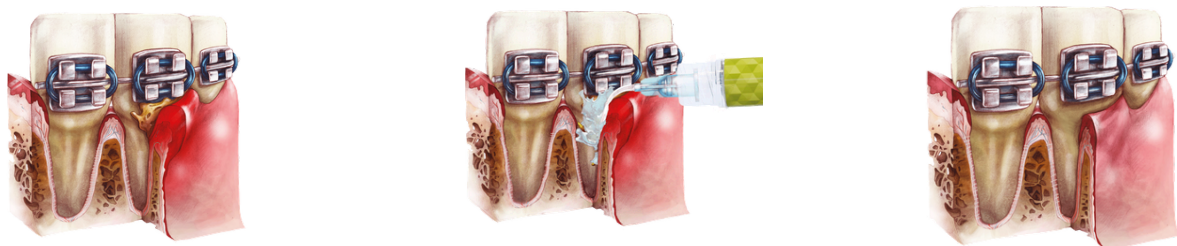

Bon à savoir

- ? Pourquoi pas un gel?**
Parce que le gel reste dans la poche et bloque la reconstruction de l'attache. La solution se rince et ne stagne pas.
- ? À quelle fréquence répéter le traitement?**
Tous les 1-3 mois, jusqu'à ce que la profondeur de la poche soit inférieure à 5 mm.
- ? PERIO-FLUSH est-il adapté à un usage à domicile?**
Non. Il s'agit d'un acte professionnel – c'est pourquoi il est efficace.
- ? Peut-on l'utiliser chez les enfants et les femmes enceintes?**
Oui, à condition que la personne traitée ne présente pas d'allergie aux composants.
- ? À quelle vitesse observe-t-on une amélioration?**
Dans la plupart des cas – dès le premier rinçage.
- ? Quel est le goût de PERIO-FLUSH?**
Le goût est nettement salé, avec une délicate note de pomme et de menthe.

Contenance

- Lot de **10 seringues de 3 ml chacune + 10 applicateurs**

