



Created by Dentists for Dentists



ARKONA

Ricostruzione del dente 24 con i compositi **FLOW-ART** e **CREATE**



SOLUZIONI RAPIDE ED EFFICACI PER PROBLEMI SERI

ETCHGEL • MASTERBOND • GLAZE



www.arkonadent.com



DESCRIZIONE DEL CASO



ARKONA



- La paziente si è recata in studio per il trattamento di una carie profonda del dente 24, estesa alle pareti prossimali. Grazie all'elevata resistenza del composito **CREATE**, siamo in grado di ricostruire in modo duraturo anche un dente gravemente danneggiato, senza la necessità di ricorrere a un laboratorio odontotecnico.





FASE 2



ARKONA



- Innanzitutto, la superficie deve essere preparata correttamente. A tale scopo, mordenzare la dentina per 10 secondi e lo smalto per 30 secondi con **ETCHGEL**; grazie alla sua punta di precisione, l'acido raggiunge esclusivamente le aree desiderate. Successivamente, risciacquare accuratamente, asciugare e applicare **MASTERBOND** per consentire l'adesione del composito ai tessuti dentali e garantire la durata a lungo termine del restauro.





FASE 3



ARKONA



- Ricopriamo lo strato più profondo della cavità con uno strato di composito FLOW-ART, per ottenere una sigillatura precisa e una transizione uniforme del restauro sulla parete laterale. La consistenza del materiale gli consente di riempire perfettamente gli spazi e di proteggere il restauro dalla formazione di bolle d'aria e da microinfiltrazioni batteriche.



www.arkonadent.com



FASE 4



ARKONA



- Possiamo ricostruire facilmente le pareti dentali mancanti utilizzando il composito **CREATE**. Il comfort di lavoro garantito dalla composizione accuratamente selezionata dei riempitivi assicura una superficie liscia dopo la polimerizzazione e facilita la ricostruzione delle singole cuspidi.




www.arkonadent.com



FASE 5



ARKONA

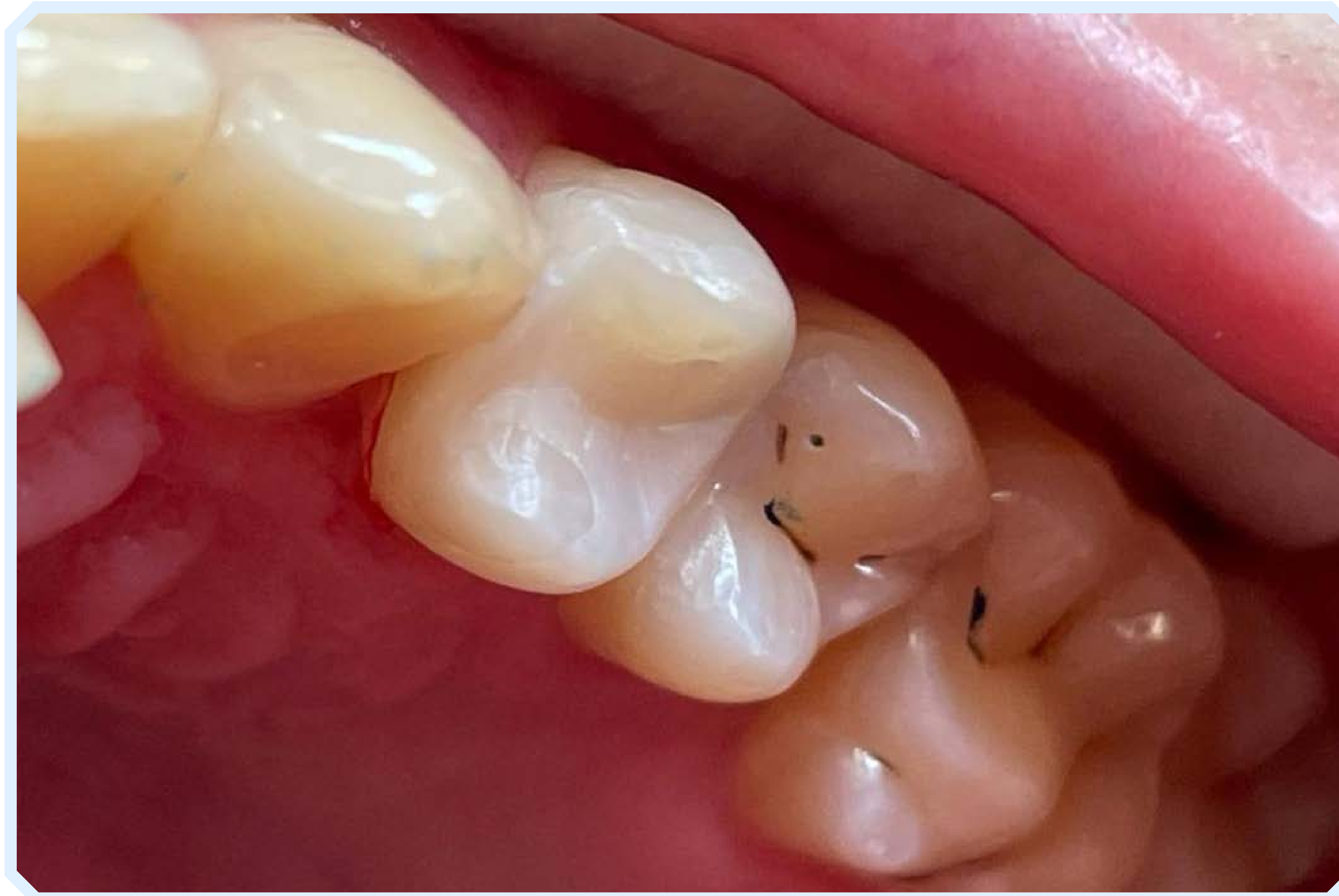

- Dopo aver rimosso la matrice, conferiamo al dente la forma definitiva e regoliamo l'occlusione utilizzando la carta articolare. Quando il dente raggiunge il corretto contatto con i denti antagonisti, possiamo procedere alla rifinitura finale del restauro.





FASE 6



ARKONA



- A tale scopo, mordenzare nuovamente il dente con **ETCHGEL**, in modo che la superficie del dente e del restauro possa aderire correttamente a **GLAZE**, garantendo la protezione del restauro e la levigatezza dell'intera superficie dentale per molti anni.



www.arkonadent.com



- L'utilizzo di **GLAZE** consente di risparmiare tempo durante il lavoro, poiché per ottenere una brillantezza perfetta non è necessario lucidare completamente il dente, evitando così il rischio di surriscaldamento. Questa breve fase dell'intera procedura garantisce la soddisfazione del paziente per il risultato finale e assicura una piacevole sensazione di comfort nel cavo orale.



I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI FLOW-ART & CREATE



ARKONA



- **Trattamento efficace della carie**, salute e sicurezza del paziente
- **Sigillatura perfetta e duratura del restauro** - gratitudine del paziente
- **Buona estetica e risparmio di tempo durante la procedura** - soddisfazione professionale e maggiore profitto
- **Un paziente soddisfatto ritorna!**



www.arkonadent.com



ARKONA

Created by Dentists for Dentists



www.arkonadent.com