



ARKONA

Created by Dentists for Dentists

Otturazione in composito del dente 25

 SOLUZIONI RAPIDE ED EFFICACI PER PROBLEMI SERI

ETCHGEL • CREATE • FLOW-ART • MASTERBOND • GLAZE



www.arkonadent.com



DESCRIZIONE DEL CASO




ARKONA



- Il paziente si è presentato in studio per il trattamento del dente 25. I tessuti interessati dalla carie sono stati rimossi e il dente è stato preparato per la ricostruzione. Grazie alla praticità d'uso dei materiali necessari per il ripristino dei tessuti dentali, la ricostruzione dell'estesa cavità di II classe ha richiesto meno di un'ora. Questo risparmio di tempo garantisce la soddisfazione e la gratitudine dei nostri Pazienti.



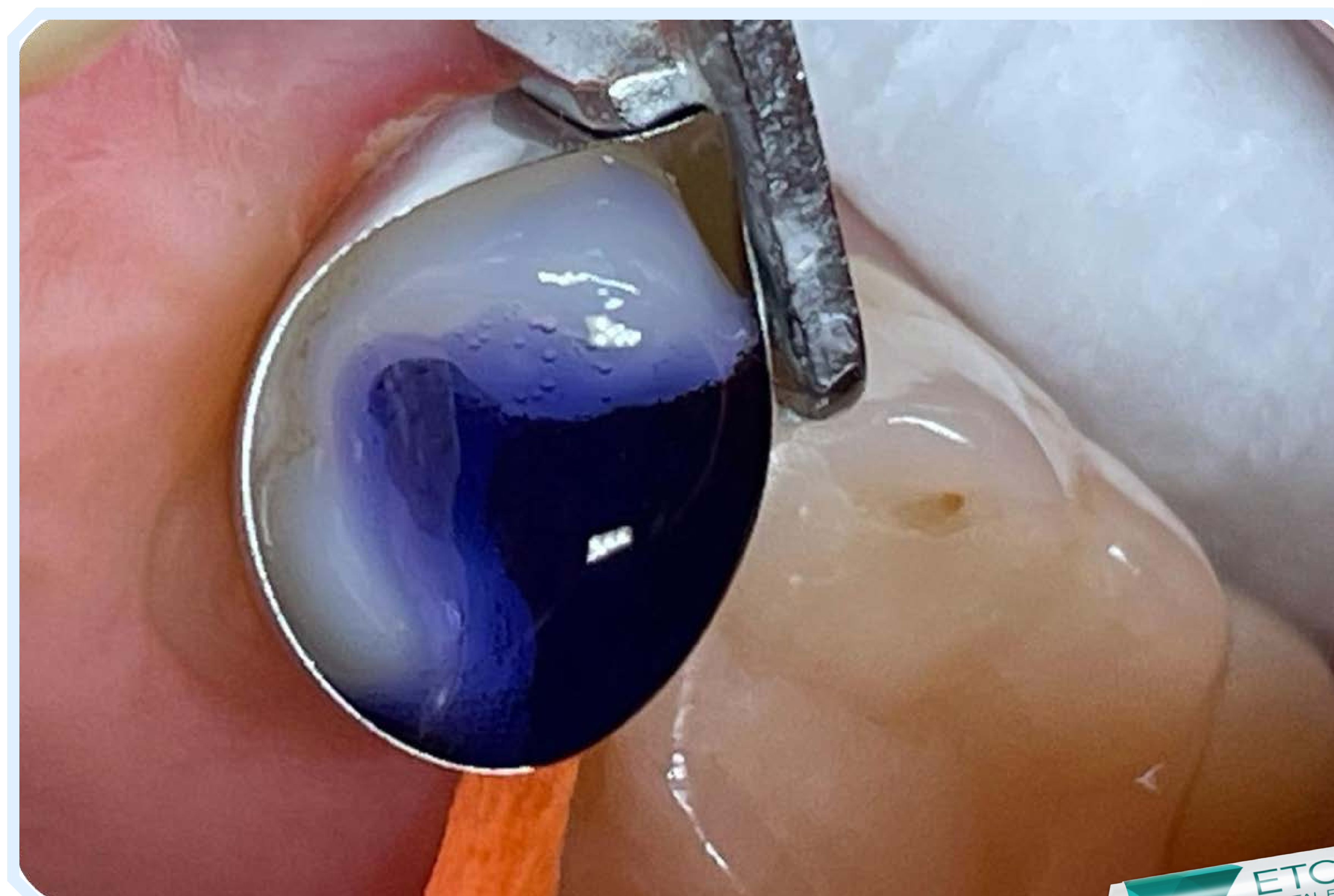

- Dopo aver posizionato la matrice e stabilizzato il dente con un cuneo, mordenziamo la dentina con ETCHGEL per 10 secondi e lo smalto per 30 secondi, quindi risciacquiamo accuratamente la sostanza con la siringa aria-acqua. L'acido fosforico, che costituisce il componente principale del mordenzante, rimuove lo smear layer, che impedirebbe la realizzazione di un restauro stabile e duraturo.



STAGE 2



ARKONA



- La mordenzatura è una fase fondamentale nella realizzazione di un'otturazione, poiché garantisce una penetrazione accurata del sistema adesivo, determinando l'adesione del composito ai tessuti dentali del paziente.





- Applichiamo MASTERBOND sui tessuti mordenzati e asciugati, avendo cura di frizionare accuratamente il liquido sulla superficie del dente. In questo modo si garantisce l'adesione del materiale ai tessuti dentali. Successivamente fotopolimerizziamo il dente per 15 secondi e procediamo con la modellazione del composito. Questa fase estremamente importante contribuirà a garantire ai vostri pazienti restauri duraturi nel tempo.



- Per prevenire la formazione di eccedenze sul fondo della cavità, applichiamo il composito **FLOW-ART**. La sua consistenza fluida e il puntale di precisione garantiscono un'eccellente sigillatura, maggiore comfort operativo e rapidità di lavoro, senza la necessità di rimuovere materiale in eccesso nella zona di contatto tra il dente e il restauro.





FASE 5



ARKONA



- Ricostruiamo i tessuti rimanenti con il composito CREATE. La sua elevata resistenza e plasticità, garantite da una composizione del riempitivo accuratamente selezionata, assicurano sicurezza e durata del restauro, aspetti fondamentali per i pazienti e che consentono loro di masticare liberamente.



www.arkonadent.com



FASE 6




ARKONA



- Dopo aver rimosso la matrice, conferiamo al dente la forma finale e regoliamo l'occlusione con carta da articolazione, affinché il paziente si senta a proprio agio nella nuova situazione. Dopo aver ottenuto un risultato soddisfacente, possiamo passare all'ultima fase, ovvero conferire lucentezza al nostro restauro!



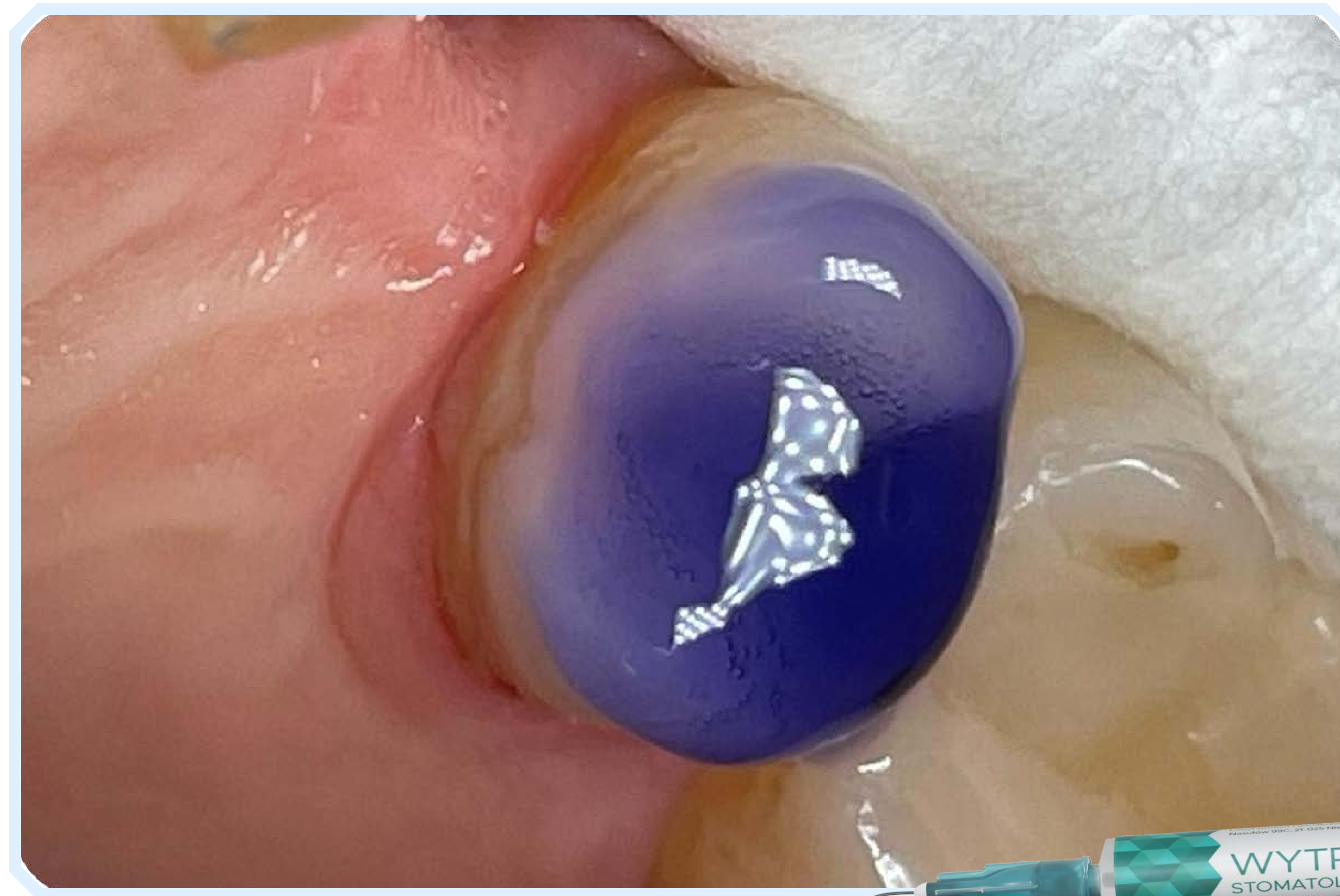

- Prima di applicare **GLAZE**, mordenzamo nuovamente il dente con **ETCHGEL**. Questo garantisce un'adesione duratura del materiale al dente e al composito e consente di risparmiare tempo sulla lucidatura meccanica.
- Il paziente potrà così godere per anni di un sorriso estetico, brillante e sano!



RISULTATO FINALE



ARKONA



- Effetti visivi dell'utilizzo di **GLAZE** in combinazione con il composito **CREATE** nel vostro studio dentistico. L'uso intuitivo e confortevole di questi materiali consente di risparmiare tempo durante il lavoro e aumentare la soddisfazione dei pazienti.



www.arkonadent.com



I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEI MATERIALI ARKONA



ARKONA



- **Soddisfazione delle esigenze del Paziente**
- gratitudine, fiducia
- **Composizioni dei prodotti accuratamente selezionate** - buona estetica e funzionalità del dente per anni
- **Risparmio di tempo durante la procedura**
- maggiore redditività
- **Un paziente soddisfatto ritorna!**





ARKONA

Created by Dentists for Dentists



www.arkonadent.com