

# MUSON

## TABLETKI MUSUJĄCE DO ROZPUSZCZANIA W WODZIE

### 90 tabletek



ARKONA

MUSON – wyrób medyczny w postaci tabletek musujących do rozpuszczania w wodzie

#### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej
- wspomaganie leczenia stanów zapalnych dziąseł, chorób przyzębia, nawracających aft i pleśniawek
- wspomaganie leczenia sezonowych infekcji a także innych stanów zapalnych zlokalizowanych w obrębie jamy ustnej i gardła

#### INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Wrzucić 1 tabletkę do 100 ml chłodnej wody (ok. połowa szklanki) i poczekać do całkowitego rozpuszczenia tabletki (30-40 s).
2. Kilukrotnie przepłukać usta przygotowanym roztworem.
3. Wypluć. Nie połykać.

Zużyć bezpośrednio po sporządzeniu. Nie przechowywać. Osad powstający po rozpuszczeniu tabletki jest naturalną cechą produktów musujących.

#### MECHANIZM DZIAŁANIA

Płukanie ust roztworem MUSON redukuje ilość drobnoustrojów znajdujących się w jamie ustnej, zapobiegając w ten sposób ich przedostaniu się do organizmu.

Regularne płukanie ust roztworem tabletki MUSON zmniejsza ryzyko przenoszenia drobnoustrojów na osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu. Ma to szczególne znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą kropelkową. MUSON wspomaga utrzymanie prawidłowej mikroflory jamy ustnej, chroniąc przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych. MUSON jest preparatem bezpiecznym i może być używany według indywidualnych potrzeb. Nie zawiera alkoholu, tym samym może być stosowany wielokrotnie w ciągu doby bez ryzyka wysuszenia śluzówki jamy ustnej.

#### SKŁAD

Dioctan chlorheksydyny, kwas cytrynowy, kwas winowy, wodorowęglan sodu, sorbitol, aromat miętowy

#### PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować wyrobu medycznego MUSON w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

#### DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane wyrobu medycznego MUSON nie są znane, jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie można wykluczyć wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej zaprzestać stosowania wyrobu.

W przypadku ostrych stanów zapalnych błony śluzowej czy otwartych ran jamy ustnej stosowanie roztworu tabletki MUSON może wywoływać reakcje bólowe.

#### INFORMACJE DODATKOWE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Tabletki MUSON są silnie higroskopijne. Po wyjęciu tabletki z opakowania należy niezwłocznie zamknąć szczelnie pojemnik. W trakcie dłuższego przechowywania tabletki mogą ulegać naturalnemu ciemnieniu. Nie ma to wpływu na efektywność działania preparatu.

Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy oraz u kobiet w ciąży.

Preparat nie wpływa negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu, przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie używać po upływie terminu ważności.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

#### GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystąpienia potwierdzonej wady.

ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.02.2021 r.